

## DÉTERGENT DÉSINFECTANT DDN 9 - 50 DOSES DE 25 ML

Référence : 23021

### **Mode d'emploi**



Préparation du bain à 0.5%.

Nous vous recommandons de porter des gants, des lunettes de protection ainsi qu'un tablier lors de la manipulation d'un détergent DDN 9.

Délayer 25 ml de DDN 9 pour 5 litres d'eau du réservoir et homogénéiser la solution. Immerger ensuite entièrement les dispositifs médicaux souillés ou tout autre élément dans le bain. Brosser ensuite les dispositifs médicaux et les écouvillonner si besoin.

Temps de contact : 15 minutes.

Rincer abondamment vos ustensiles et renouveler le bain pour chaque nettoyage.

## Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **10/2023**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit.

## Détergent désinfectant neutre DDN 9 de 50 doses de 25 ml

Produit élaboré pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux. Efficace contre les bactéries, les levures et les virus.

- Intervient sur les biofilms bactériens.
- Associable avec un large panel de matériaux.
- Large spectre antimicrobien.
- Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage.
- Peut être utilisé au bloc, en endoscopie, en ophtalmologie et contactologie.
- Utilisation en bac à ultrasons.

Le détergent désinfectant est aussi disponible en [bidon de 1 litre avec doseur](#).



## DÉTERGENT DÉSINFECTANT DDN 9 - 50 DOSES DE 25 ML Référence : 23021

### **Propriétés microbiologiques**

En conditions de saleté. Concentration de 0.5%.

- Bactéricide : EN1276, EN13727, EN13697, EN14561
- Levuricide : EN13624, EN1650, EN13697, EN14562
- Virucide: Virus PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV (virus modèle de l'hépatite C), Virus VIH.