

## DÉTERGENT DÉSINFECTANT DDN 9 - 1L AVEC DOSEUR

Référence : 23020

### Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté. Concentration de 0.5%.



- Bactéricide : EN1276, EN13727, EN13697, EN14561
- Levuricide : EN13624, EN1650, EN13697, EN14562
- Virucide: Virus PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV (virus modèle de l'hépatite C), Virus VIH.

### Détergent désinfectant neutre DDN 9 de 1 litre avec doseur.

Pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux. Ce produit est efficace contre les bactéries, les levures et les virus.

- Efficacité prouvée sur biofilm
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Large spectre antimicrobien
- Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage
- Peut être utilisé au bloc, en endoscopie, en ophtalmologie et contactologie
- Utilisation en bac à ultrasons
- Bidon de 1 litre

Disponible aussi en [sachet de 50 doses de 25 ml.](#)

### Mode d'emploi

Préparation du bain à 0.5%.

Il est recommandé de porter des gants ainsi que des lunettes et un tablier lors de l'utilisation d'un



## DÉTERGENT DÉSINFECTANT DDN 9 - 1L AVEC DOSEUR

Référence : 23020

détergent DDN 9.

Diluer 25 ml de DDN 9 pour 5 litres d'eau du réservoir et homogénéiser la solution. Baigner ensuite entièrement les dispositifs médicaux usagés ou tout autre outil dans le bain. Brosser ensuite les ustensiles médicaux et les écouvillonner si besoin.

Temps de contact : 15 minutes.

Rincer abondamment vos ustensiles et renouveler le bain pour chaque nettoyage.