

## TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SPENGLER BRAS VIOLET

Référence : 22047-H

### Description :



- Méthode oscillométrique avec mesure pendant le dégonflage du brassard.
- Fonctionnement entièrement automatique : gonflage contrôlé, dégagement d'air par valve.
- Afficheur à cristaux liquides avec heure, date et indicateur de décharge des piles.
- Utilisation simple via deux boutons, prise de mesure rapide et silencieuse.
- Convient à l'adulte et à l'enfant > 8 ans ou > 30 kg selon protocole.

### Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 22047-H.
- **Plage pression** : 30 à 260 mmHg ; résolution 1 mmHg ; précision  $\pm 3$  mmHg.
- **Fréquence cardiaque** : 30 à 200 BPM ; résolution 1 BPM ; précision  $\pm 5$  %.
- **Détections** : hypertension, troubles du rythme, mouvement.
- **Brassard** : adulte 22-42 cm.
- **Mémoire** : enregistrements internes pour le suivi (jusqu'à 90).
- **Alimentation** : 4 piles LR03 (AAA) fournies.
- **Accessoires** : boîtier de rangement, manuel d'utilisation.

## Tensiomètre électronique Spengler bras : mesure précise, lecture rapide

Appareil de mesure oscillométrique entièrement automatique avec écran LCD, heure/date et indicateur de piles, livré avec brassard adulte 22-42 cm pour des contrôles fiables au quotidien.

- **Utilisation intuitive (2 boutons).**
- **Écran LCD lisible heure/date.**
- **Brassard adulte 22-42 cm.**
- **Gonflage et dégonflage automatiques.**
- **Détection des mouvements et arythmies.**

### Mode d'emploi :

- Repos 5 minutes en position assise, bras au niveau du cœur.
- Placez le brassard 2-3 cm au-dessus du pli du coude, tuyau vers l'avant.
- Lancez la mesure et restez immobile, sans parler, jusqu'à l'affichage.
- Notez tension systolique/diastolique et pouls ou utilisez la mémoire intégrée.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SPENGLER BRAS VIOLET

Référence : 22047-H

- Répétez à la même heure chaque jour pour un suivi comparable.

### Précautions d'utilisation :

- N'effectuez pas de mesure immédiatement après effort, caféine ou tabac.
- Évitez les vêtements serrés sous le brassard et les mouvements durant la mesure.
- Consultez en cas de valeurs anormales répétées ou de symptômes.
- Remplacez les piles quand l'indicateur l'exige et conservez le produit au sec.
- Nettoyez le brassard et l'appareil avec un linge doux légèrement humide.

### Suivi tensionnel fiable pour cabinets, entreprises et particuliers

Le tensiomètre électronique Spengler bras combine simplicité d'usage et spécifications de précision pour des contrôles réguliers au cabinet, au poste de soins ou à domicile. Son brassard 22-42 cm couvre la majorité des tours de bras et l'afficheur facilite la lecture immédiate.

La détection d'hypertension, d'arythmie et des mouvements contribue à fiabiliser le résultat et à standardiser vos protocoles de dépistage ou de suivi thérapeutique.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502