


## TEST D'ACUITÉ VISUELLE LANDOLT

Référence : 21031

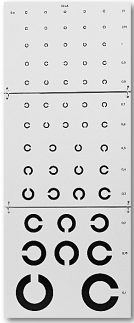

**Dimensions:**

215 x 250mm / Epaisseur : 1.2mm

**Mode d'emploi:**

Sortez l'échelle de son emballage, dépliez-la avec précaution pour ne pas rayer les plaques.

Accrocher l'échelle au à l'aide de la chaîne à une hauteur d'environ 180cm.

Le sujet doit se tenir à une distance égale à « D » indiqué sur l'échelle (3 ou 5 mètres).

Tester auparavant la vision en mode binoculaire puis procéder successivement au test de chaque œil en masquant l'œil non testé par un objet opaque.

**Matière:**

Plaques en PVC blanc 1000g/m2, chaînes et anneaux en acier

**Précaution d'emploi:**

- Éviter les éclairages altérant la vision normale du texte
- Éviter les rayures et les effaçages
- Ne pas nettoyer à l'acétone

Test d'acuité visuelle LANDOLT à 5 mètres, pour illetrés

Dispositif permettant d'établir un bilan visuel

Il composés de 3 plaques en PVC blanc et chaînette de suspension avec impression en noir.

**Produit éco-responsable:**

les plaques peuvent être recyclées dans les conteneurs pour PVC