


MONTRE INFIRMIÈRE BLEUE

Référence : 14048

[Montre infirmière]

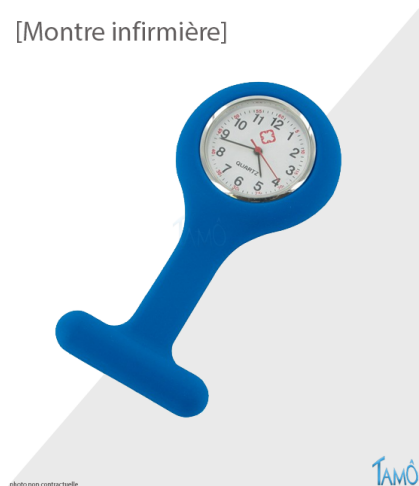

MONTRE INFIRMIÈRE - BLEUE

Caractéristiques :

Montre étanche avec **système d'accroche par une épingle de sureté**,

La montre se retire de son **support silicone** pour pouvoir en assurer son nettoyage,

Pour **mettre en fonction la montre trotteuse** : dégagez-la de son corps en silicone. Tirer sur le remontoir et tournez-le pour régler l'heure puis repousser le remontoir pour le bloquer. Remettre le corps de la montre du côté opposé à l'épingle de fixation.

Changement de la pile à l'arrière de la montre : ouvrez le boîtier grâce à un outil pointu et fin pour accéder à la pile. Retirer la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérer la nouvelle en respectant la polarité, le « + » vers le haut. Remettre la protection blanche et refermer le boîtier.

Caractéristiques techniques :

- Nettoyage de la coque en silicone avec une eau savonneuse
- Dimensions: 85x40mm
- Dimensions du cadran: 25mm
- Poids: 28g

MONTRE INFIRMIÈRE - BLEUE

Cette **montre infirmière** de couleur **bleue** est en **silicone lavable** garantissant sécurité et hygiène

- Montre infirmière en silicone
- Livrée dans une boîte en métal
- Couleur : Bleu