

## LUNETTES À OXYGÈNE ADULTE

### Référence : 22095A



#### Description :

- Permet l'inhalation d'oxygène concentré par voie nasale
- Idéal pour l'oxygénothérapie de longue durée chez l'adulte
- Utilisable dans les situations d'urgence respiratoire type 1 et 2
- Modèle pour adulte avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 200 cm
- Conditionnement individuel pour une utilisation hygiénique

#### Caractéristiques techniques :

- **Couleur** : Vert, Transparent
- **Débit d'oxygène** : 1 à 4 L/min
- **Dimension** : Ø 4 mm x 200 cm
- **Conditionnement** : Sous sachet individuels soudé
- **Embout nasal** : PVC doux
- **Étanche** : Non
- **Tuyau anti-écrasement**
- **Dispositif médical de classe 2a**

#### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **14 novembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Lunettes à oxygène pour enfant

Les lunettes à oxygène sont destinées à l'apport d'oxygène par voie nasale, à faible débit. La courbure des embouts s'adapte parfaitement à l'anatomie des adultes.

- **Système d'inhalation optimisé pour un apport en O2 concentré**
- **Adaptée aux adultes**
- **Tuyau anti-écrasement pour un flux constant**
- **Embouts nasaux doux et sécurisés en PVC**
- **Produit stérile et à usage unique**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## LUNETTES À OXYGÈNE ADULTE

### Référence : 22095A

#### **Mode d'emploi :**

- Placer les embouts nasaux dans les narines
- Ajuster l'élastique derrière la tête pour un maintien optimal
- Régler le débit d'oxygène entre 1 et 4 L/min en fonction des besoins
- Utilisation adaptée aux adultes nécessitant un soutien respiratoire

#### **Précautions d'utilisation :**

- Usage unique : ne pas réutiliser après une première utilisation
- Veiller à ne pas dépasser le débit maximal recommandé de 4 L/min
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe
- En cas d'allergie au PVC, ne pas utiliser ce dispositif

### **Lunettes à oxygène pour une oxygénation sans compromis**

Les lunettes à oxygène sont spécialement conçues pour offrir une solution sûre et efficace d'oxygénothérapie.

Ces lunettes assurent un apport optimal d'oxygène même en situation d'urgence. Le tuyau anti-écrasement garantit un flux d'air constant et sécurisé, tandis que les embouts nasaux en PVC doux assurent un confort maximal, même sur une longue période.

Ce dispositif est essentiel pour tout professionnel de la santé ou parent soucieux de répondre rapidement à une situation de détresse respiratoire.

Retrouvez également l'ensemble de nos **matériels d'oxygénothérapie**.

**1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var**

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502