

## POMPE ANTI VENIN ASPIVENIN

Référence : 12016

### POMPE ANTI VENIN - ASPIVENIN



#### Caractéristiques :

- le réflexe anti-venin, est une pompe à déclenchement automatique qui aspire les venins injectés par des insectes et des animaux venimeux pour limiter leur diffusion dans l'organisme.
- Elle est une pompe aspirante de venin à déclenchement automatique, utilisable d'une seule main. D'un seul geste, une faible pression de l'appareil sur la peau déclenche l'aspiration.
- Livré avec 2 embouts
- Le temps d'application dépend du type de piqûre / morsure :
- 20 à 30 secondes: MOUSTIQUE, MOUCHE
- 1 minute à 3 minutes: GUEPE, ABEILLE, FRELON
- 1 à 2 minutes: ARAIGNEE, SCORPION
- 2 à 3 minutes: POISSON PIERRE etc..

### POMPE ANTI VENIN - ASPIVENIN

La **pompe anti venin ASPIVENIN** est une pompe à **déclenchement automatique**. Très utile pour toutes les **morsures de serpent, de piqûre de scorpion et de tout autre insecte**.

Elle peut être utilisée sur toute personne victime d'une piqûre ou morsure venimeuse et sur toutes les parties du corps à l'exception des **paupières, muqueuses, parties génitales et tympans**.

- Très facile d'utilisation
- Déclenchement automatique

### POMPE ANTI VENIN - ASPIVENIN

#### Mode d'emploi:

- 1-Placez sans forcer l'embout le mieux adapté au type et à l'emplacement de la piqûre ou morsure puis armez la pompe en tirant le piston à fond (à moitié pour un enfant).
- 2- Placez la pompe ASPIVENIN® muni de son embout sur la blessure en le tenant d'une seule main.
- 3- Placez la pompe ASPIVENIN® muni de son embout sur la blessure en le tenant d'une seule main.
- 4- Soulevez ensuite le bouton du piston de la pointe du pouce pour retirer la pompe ASPIVENIN®. Nous vous conseillons de manipuler votre pompe anti-venin avant d'en avoir l'utilité en consultant la notice. Nous vous conseillons également de la conserver à portée de main si vous vous trouvez dans un environnement à



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## POMPE ANTI VENIN ASPIVENIN

Référence : 12016

risque.

**1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var**

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502