

5 PANSEMENTS HYDROCOLLOÏDES SPÉCIAL AMPOULE

Référence : 10895



Description :

- Pansement hydrocolloïde auto-adhésif, non stérile et à usage unique, spécialement conçu pour la protection des ampoules.
- Constitué d'une couche de matériau hydrocolloïde adhésif contenant de la carboxyméthylcellulose pour épouser la zone à couvrir.
- Transparent, étanche à l'eau et quasi invisible, il permet de porter chaussures et chaussettes en toute discrétion.
- Barrière antibactérienne et protectrice contre la poussière et la saleté, idéale en prévention des contaminations extérieures.
- Pansement souple aux formes anatomiques, confortable et adapté aux zones de frottement (talon, orteils, côté du pied, etc.).

Caractéristiques techniques :

- **Nature du pansement** : pansement hydrocolloïde auto-adhésif, non stérile et transparent.
- **Composition** : couche hydrocolloïde adhésive contenant de la carboxyméthylcellulose, protégée par un papier siliciné.
- **Dimensions** : pansement de 7 cm × 3,8 cm, format adapté aux ampoules du pied.
- **Protection** : étanche à l'eau, barrière antibactérienne, contre la poussière et la saleté.
- **Conditionnement** : boîte de 5 pansements hydrocolloïdes spécial ampoule à usage unique.

5 pansements hydrocolloïdes spécial ampoule : protection invisible et étanche

Protègent efficacement les ampoules et zones de frottement grâce à un pansement hydrocolloïde auto-adhésif, souple, transparent et étanche, qui forme une barrière contre les bactéries, la poussière et la saleté pour favoriser une cicatrisation en toute discrétion.

- **Hydrocolloïde auto-adhésif**
- **Transparent et invisible**
- **Étanche à l'eau**
- **Barrière antibactérienne**
- **Forme anatomique souple**

Mode d'emploi :

- Nettoyer et sécher soigneusement la peau autour de l'ampoule avant la pose du pansement.

5 PANSEMENTS HYDROCOLLOÏDES SPÉCIAL AMPOULE

Référence : 10895

- Retirer délicatement le papier siliconé qui protège la face enduite du pansement sans toucher la surface adhésive.
- Appliquer le pansement hydrocolloïde sur l'ampoule en veillant à bien centrer la zone hydrocolloïde sur la zone à protéger.
- Lisser les bords du pansement pour assurer une parfaite adhérence et une bonne étanchéité à l'eau et aux impuretés.
- Laisser le pansement en place jusqu'à ce qu'il commence à se décoller, puis le retirer en douceur et le remplacer si nécessaire.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser sur des ampoules infectées non traitées ou sur des blessures mineures infectées.
- Ne pas appliquer sur des blessures graves, des saignements abondants, des plaies très exsudatives ou des ulcères.
- Réserver l'usage de ce pansement aux indications mentionnées dans la notice ; éviter tout autre usage non prévu.
- Ne pas réutiliser un pansement déjà posé : produit à usage unique, à jeter après retrait.
- Surveiller l'apparition d'éventuels signes d'intolérance locale (rougeur, douleur, suintement) et consulter un professionnel de santé en cas de doute.

Des pansements hydrocolloïdes discrets pour protéger vos ampoules

Les **pansements hydrocolloïdes spécial ampoule** sont particulièrement adaptés aux **zones de frottement** comme le talon ou les orteils, souvent sollicités dans les chaussures de ville, de travail ou de randonnée. Grâce à leur **matière hydrocolloïde auto-adhésive**, transparente et étanche, ils forment une véritable **seconde peau** qui protège l'ampoule des pressions et des frictions, tout en constituant une **barrière antibactérienne** contre la poussière et la saleté.

Leur format anatomique 7 × 3,8 cm et leur grande souplesse en font un choix idéal pour compléter une [trousse de secours](#) à la maison, au travail, en voyage ou dans un **kit de premiers soins** pour activités sportives. Discrets, confortables et faciles à poser, ces **5 pansements hydrocolloïdes spécial ampoule** vous accompagnent au quotidien pour limiter les gênes liées aux frottements et améliorer la protection de la peau fragilisée.