

MASQUE BOUCHE À BOUCHE PORTE-CLÉ

Référence : 8021PC



Description :

- Masque bouche à bouche avec valve anti-retour limitant les risques de contamination croisée.
- Film transparent facilitant le positionnement et le contrôle visuel de l'insufflation.
- Instructions d'utilisation imprimées sur le film pour un guidage pas à pas.
- Étui porte-clé avec fermeture velcro pour un accès rapide en situation d'urgence.
- Masque remplaçable dans l'étui afin de garder le porte-clé prêt à l'emploi.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 8021PC.
- **Étui souple** : env. 5 x 5 x 1,7 cm ; fermeture velcro ; anneau Ø 25 mm.
- **Film** : longueur oreille-à-oreille env. 28 cm ; hauteur menton-front env. 19,5 cm.
- **Embout** : orifice de soufflage centré sur le film.
- **Usage** : insufflation en bouche-à-bouche avec filtre/valve anti-retour.
- **Compatibilité** : masque de remplacement possible (réf. 8021).
- **Conditionnement** : unité, prêt à accrocher au trousseau.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **mars 2029**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Masque bouche à bouche porte-clé : geste barrière immédiat en réanimation

Masque de protection transparent avec valve anti-retour pour pratiquer l'insufflation sans contact direct, rangé dans un étui porte-clé compact pour une disponibilité immédiate sur le terrain.

MASQUE BOUCHE À BOUCHE PORTE-CLÉ

Référence : 8021PC

- **Valve anti-retour sécurisante.**
- **Instructions imprimées.**
- **Film transparent large.**
- **Étui porte-clé compact.**
- **Remplaçable/réutilisable (étui).**

Mode d'emploi :

- Ouvrez l'étui, dépliez le film et placez le masque sur la bouche du victime.
- Positionnez l'embout de soufflage devant la bouche et pincez le nez si nécessaire.
- Assurez l'étanchéité, insufflez selon le protocole de RCP en vigueur.
- Surveillez la levée du thorax et adaptez le rythme aux recommandations.
- Après usage, éliminez le masque selon vos procédures d'hygiène et remplacez-le dans l'étui.

Précautions d'utilisation :

- Utilisez dans le cadre d'une RCP conforme aux recommandations en cours.
- Vérifiez l'intégrité du film, de la valve et de l'embout avant utilisation.
- Ne réutilisez pas le masque après un acte d'insufflation (usage à usage unique).
- Conservez l'étui propre, au sec, accessible sur vous ou sur une trousse.
- Remplacez immédiatement le masque si l'emballage est endommagé.

Protection hygiénique pour RCP en entreprise, sport et intervention

Compact et toujours à portée de main, le masque bouche à bouche porte-clé sécurise l'insufflation grâce à sa valve anti-retour et ses instructions imprimées. Il s'intègre naturellement aux trousse de secours, aux EPI des équipes encadrantes et aux dotations des secouristes occasionnels.

Son film large et transparent facilite la mise en place tandis que l'étui porte-clé garantit une disponibilité immédiate lors d'une urgence respiratoire.