

25 DOSES DE DÉTERGENT 25ML

Référence : 23030

Description :

- Nettoyage et désinfection efficaces des dispositifs médicaux, y compris les instruments thermosensibles et le matériel d'endoscopie.
- Combinaison innovante de principes actifs garantissant une désinfection performante sans corrosion.
- S'utilise en trempage avec un temps de contact minimum de 5 minutes.
- Convient à une large gamme de matériaux médicaux.
- Conforme aux normes européennes pour une protection antimicrobienne étendue.



Caractéristiques Techniques :

- **Solution limpide bleue:** Facile à vérifier visuellement
- **pH équilibré:** pH de 6,5 à 7,5
- **Temps de contact:** 5 à 60

Propriétés microbiologiques :

Activité/Conditions	Concentration	Temps de contact
Bactéricide - Selon EN 13727 et EN 14561, conditions de saleté	0,5%	5 min
Levuricide - Selon EN 13624 et EN 14562, conditions de saleté	0,5%	15 min
Tuberculocide - Selon EN 14348 et EN 14563, conditions de saleté	2,0%	60 min
Efficace contre les virus enveloppés - Selon EN 14476 / EN 17111, conditions de saleté	0,5% 1,0%	15 min 5 min

Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 octobre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.



25 DOSES DE DÉTERGENT 25ML

Référence : 23030

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Lot de 25 doses de détergent 25ml : allié pour la désinfection des instruments chirurgicaux

Profitez d'une solution de nettoyage médical hautement efficace et non corrosive, compatible avec une large gamme de matériaux, pour une désinfection fiable et sécurisée de vos équipements médicaux. Sa formule brevetée, combinant des principes actifs innovants, répond aux normes de désinfection les plus strictes.

- **Hygiène optimale**
- **Formule brevetée**
- **Simplicité d'utilisation**
- **Compatibilité étendue**
- **Efficacité prouvée**

Produits Complémentaires :

- [Bidon 5l Nettoyant Désinfectant Medspray](#) - Réf: 23025-5L
- [Détergent surfaces et sols \(1l\) - Surfanios Premium](#) - Réf: 23016
- [Détergent surfaces et sols \(1l\) - Deterg'anios](#) - Réf: 23026

Mode d'emploi :

- Préparer une solution de travail en utilisant une **dose de 25 ml** (dilution selon vos protocoles).
- Plonger les instruments dans le bain : utilisation en **trempage**.
- Respecter un **temps de contact minimum de 5 minutes** (ajuster selon le niveau d'action souhaité).
- Retirer les dispositifs et poursuivre le processus selon votre procédure (rinçage/étapes suivantes selon organisation interne).
- Renouveler la préparation selon votre fréquence d'usage et vos règles d'hygiène.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser sur des dispositifs non compatibles avec le trempage : vérifier vos procédures internes avant mise en place.
- Respecter les temps de contact et les concentrations définis par votre organisation pour éviter une efficacité insuffisante.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage ou de désinfection, sauf protocole explicitement validé.
- Conserver les doses au sec, à l'abri de la chaleur et des chocs pour préserver le conditionnement.
- Tenir hors de portée des enfants et utiliser dans un cadre professionnel, avec les mesures de protection adaptées.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

25 DOSES DE DÉTERGENT 25ML

Référence : 23030

Des doses unitaires pour fiabiliser votre routine de nettoyage des instruments

En cabinet, collectivité ou structure de soins, la régularité du **nettoyage** et de la **pré-désinfection** joue un rôle clé dans la sécurité de manipulation des instruments. Ces **doses de détergent 25 ml** aident à standardiser la préparation, tout en offrant une solution **non corrosive** et adaptée à une **large gamme de matériaux**. La **solution bleue** facilite le contrôle visuel, et l'usage en **trempage** permet une mise en œuvre simple, avec un **temps de contact** ajustable selon vos besoins. Pour compléter votre sélection, explorez nos [détergents et désinfectants pour sols, surfaces et matériels](#) ainsi que la gamme [désinfection du matériel et hygiène des mains](#).

Le lot de **25 doses** convient parfaitement aux consommations régulières : vous gérez vos stocks plus finement et limitez les pertes.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502