

GLUCOMÈTRE SPENGLER

Référence : 14080

Description :



- Auto-calibration intégrée, limitant les manipulations manuelles
- Affichage large et lisible pour une lecture rapide des résultats
- Prélèvement minimal de 0,5 µL de sang seulement
- Sites alternatifs de prélèvement (paume, avant-bras)
- Alerte en cas de glycémie anormale et rappels personnalisables

Caractéristiques techniques :

- **Mémorisation jusqu'à 500 tests** avec calcul automatique des moyennes sur 7, 14 et 30 jours
- Connectivité PC via câble USB-C (en option)
- Bandelettes avec **durée de vie de 24 mois** (flacon fermé) et 12 mois après ouverture
- Fonction d'éjection hygiénique des bandelettes usagées
- **Alimentation** : 2 piles AAA incluses

La solution de glycémie portable conçue pour les professionnels du soin d'urgence

Grâce à son taux de biais réduit (12 % seulement) et son système d'auto-calibration, le glucomètre Spengler JT100 garantit des résultats fiables en toutes circonstances. Il se distingue par son confort d'utilisation, son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées idéales pour un usage sur le terrain.

- **Précision renforcée** : biais de seulement 12 % contre 15 % en moyenne
- **Lecture rapide et claire** : grand écran LCD rétroéclairé
- **Piqûre quasi indolore** : lancettes 30G ultra-fines biseautées
- **Suivi facilité** : mémoire de 500 résultats avec moyennes automatiques
- **Utilisation hygiénique** : éjecteur de bandelettes sans contact avec le sang

Mode d'emploi :

- Insérer une bandelette test dans le glucomètre.
- Piquer le doigt avec l'autopiqueur et prélever une goutte de sang.
- Appliquer la goutte à l'extrémité de la bandelette.
- Lire le résultat affiché sur l'écran LCD.
- Éjecter la bandelette usagée avec le bouton dédié.
- Enregistrer ou consulter les moyennes sur l'appareil si nécessaire.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

GLUCOMÈTRE SPENGLER

Référence : 14080

Précautions d'utilisation :

- Utiliser uniquement les bandelettes compatibles JT100.
- Ne pas utiliser une bandelette après sa date de péremption.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Remplacer les piles dès que le signal d'usure s'affiche.
- Conserver le flacon de bandelettes bien fermé pour garantir leur durée de vie.

Un glucomètre de précision pensé pour les interventions rapides et les environnements exigeants

Conçu pour les professionnels de santé en situation d'urgence, le glucomètre Spengler JT100 allie fiabilité, simplicité d'utilisation et performance clinique. Grâce à son système d'auto-calibration, il évite les erreurs de manipulation tout en fournissant une mesure précise et immédiate de la glycémie, élément essentiel du diagnostic préhospitalier.

Son design compact, ses options de mémorisation étendues, et ses alertes intégrées en font un outil de surveillance glycémique nomade, parfaitement adapté à la pratique des secours, infirmiers libéraux, ou services de premiers soins.

Contenu du kit :

- 1 Glucomètre Spengler JT100
- 10 Bandelettes test
- 1 Solution de contrôle
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Lancettes ultra-fines 30G
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Carnet de suivi glycémique
- 1 Trousse de transport
- 2 Piles AAA

Retrouvez également l'ensemble de nos **lecteurs de glycémie**.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502