

## STOP SANG GRAND MODÈLE POUR PANNEAU ET STATION CEDERROTH

Référence : 1097

### Description :



- Dispositif conçu pour la prise en charge rapide des saignements importants
- Permet d'exercer une pression directe sur la zone concernée
- Format large adapté aux plaies étendues
- Compatible avec les panneaux et stations de premiers secours Cederroth
- Idéal pour les environnements professionnels et collectifs

### Caractéristiques techniques :

- **Type** : dispositif stop sang
- **Format** : grand modèle
- **Compatibilité** : panneau et station Cederroth
- **Usage** : compression de saignement
- **Conditionnement** : unité individuelle

### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 août 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Stop sang grand modèle : action rapide pour maîtriser un saignement

Une solution efficace pour assurer une **compression immédiate** et limiter un **saignement abondant** lors d'une intervention de premiers secours.

- **Compression rapide**
- **Format grand modèle**
- **Prêt à l'emploi**
- **Compatible Cederroth**
- **Usage en urgence**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## STOP SANG GRAND MODÈLE POUR PANNEAU ET STATION CEDERROTH

Référence : 1097

### Mode d'emploi :

- Sortir le stop sang de son compartiment ou emballage
- Appliquer directement sur la zone qui saigne
- Exercer une pression ferme et continue
- Maintenir la compression jusqu'à l'arrêt du saignement
- Relayer par un pansement ou un suivi adapté si nécessaire

### Précautions d'utilisation :

- Usage unique, ne pas réutiliser le dispositif
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas relâcher la pression prématurément
- Utiliser uniquement sur une peau accessible
- Tenir hors de portée des enfants

## Un indispensable pour la gestion des saignements en entreprise

Le **stop sang grand modèle** est un élément clé pour la **prise en charge rapide des hémorragies** lors des situations d'urgence. Son format large permet une **compression efficace** sur des zones étendues, contribuant à limiter la perte de sang en attendant une prise en charge complémentaire.

Conçu pour s'intégrer parfaitement aux **panneaux et stations Cederroth**, ce dispositif trouve naturellement sa place dans les équipements de **premiers secours professionnels**, garantissant une intervention rapide et organisée.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502