

BRASSARD POUR TENSIONNÈTRE OBÈSE LIAN METAL XXL

Référence : 22069

Description :



- Brassard **extra large** adapté aux **très grands tours de bras**, idéal pour la mesure de la tension chez le patient obèse ou très corpulent.
- Confection en **nylon gris résistant**, léger et agréable au contact de la peau, parfaitement adapté aux usages répétés en cabinet.
- **Fermeture velcro** large assurant un maintien fiable pendant la prise de tension, même sur bras volumineux.
- **Poche simple tubulure 60 cm** avec raccord rapide à vis (embout mâle) pour connexion directe au tensiomètre **Lian Metal** et autres modèles compatibles.
- Brassard **lavable à 30-40 °C**, facile d'entretien, pour préserver l'hygiène du matériel de tension artérielle.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : brassard extra large pour tensiomètre manopaire Lian.
- **Compatibilité appareils** : Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur (hors Lian Classic).
- **Tubulure** : poche simple tubulure 60 cm avec raccord rapide à vis, embout mâle.
- **Matériau** : nylon gris avec bande velcro de serrage.
- **Entretien / réglementation** : lavable 30-40 °C, dispositif médical classe I, marquage CE, garantie 6 mois.

Brassard pour tensiomètre obèse lian metal xli : confort pour très grands bras

Brassard **extra large en nylon gris** avec **fermeture velcro** et **poche simple tubulure 60 cm**, conçu pour la **prise de tension sur bras très fort ou patient obèse** avec les tensiomètres **Lian**.

- **Taille extra large pour bras forts**
- **Nylon gris robuste et léger**
- **Fermeture velcro rapide et sûre**
- **Tubulure 60 cm raccord vis mâle**
- **Brassard lavable pour usage intensif**

Mode d'emploi :

- Visser la tubulure du **brassard pour tensiomètre obèse LIAN METAL XXL** sur le raccord à vis du tensiomètre Lian utilisé.

BRASSARD POUR TENSIONNÈTRE OBÈSE LIAN METAL XXL Référence : 22069

- Positionner le brassard sur le bras nu du patient, 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, en centrant le repère sur l'artère brachiale.
- Serrer la bande velcro jusqu'à obtenir un maintien ferme mais confortable sur le bras fort.
- Effectuer la mesure de tension artérielle selon la procédure habituelle (gonflage, dégonflage progressif, lecture du manomètre).
- Après utilisation, dégonfler totalement, retirer le brassard et le nettoyer ou le désinfecter selon le protocole du service.

Précautions d'utilisation :

- Réserver l'usage à des **tensionnètres Lian compatibles** et à des patients présentant un tour de bras adapté à cette taille extra large.
- Ne pas trop serrer le brassard afin d'éviter douleur ou compression excessive, surtout chez les patients à risque vasculaire.
- Éviter de placer le brassard sur un bras porteur de perfusion, présentant plaie ou fistule artério-veineuse, sans avis médical.
- Vérifier régulièrement l'état du velcro, des coutures et de la tubulure ; remplacer le brassard en cas d'usure ou de fuite.
- Respecter les températures de lavage recommandées et laisser sécher complètement avant réutilisation pour préserver la précision des mesures.

Brassard extra large pour prise de tension sur bras fort

Le **brassard pour tensionnètre obèse LIAN METAL XXL** répond aux besoins des cabinets prenant en charge des **patients obèses** ou à **très grand tour de bras**. En offrant un **brassard extra large en nylon**, parfaitement compatible avec la gamme de **tensionnètres Lian**, il limite les erreurs de mesure liées à l'utilisation d'un brassard trop petit et améliore la fiabilité du suivi de l'**hypertension artérielle**.

Robuste, lavable et simple à connecter grâce à son **raccord vis mâle**, ce **brassard de tensionnètre pour bras fort** est idéal pour les **médecins généralistes, cardiologues**, services d'**urgence** ou équipes de **premiers secours** recherchant une solution adaptée à toutes les morphologies de patients.