

## TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE - SANS ÉTHYLOTEST

Référence : 10083-SE



### Une trousse de secours sans éthylotest pour les véhicules

Qu'il s'agisse d'un véhicule personnel ou d'un véhicule utilitaire, avoir une trousse de premiers soins dans son habitacle peut être très utile en cas de blessure ou d'accident.

La trousse de premiers soins pour véhicule est destinée à tous les employés qui se déplacent quotidiennement en voiture depuis leur domicile, les commerciaux qui voyagent régulièrement et les conducteurs tels que les camions, les autobus et les tracteurs. Les trousse de secours offrent aux professionnels la possibilité de se soigner rapidement.

En plus du matériel de secours, il est obligatoire de s'équiper d'un triangle de présignalisation et d'un gilet de sécurité fluo. Aussi, pour vous assurer que vous conduisez dans le respect des règles de sécurité routière en vigueur par la Commission de la sécurité routière (CISR) et en lien avec les restrictions d'alcool (0,5 g/l de sang).

#### Description :

- Les **trousse de secours véhicule SANS éthylotest** sont faites pour toutes les conducteurs et les passagers
- Parfaites pour être sûr de **faire face à tous les petits soins liés à la voiture**
- Composées de **pansements assortis, d'un sparadrap microporeux** et de **compresses stériles** pour les **petits soins** ainsi que de **bandes de gaze** pour une **aide au maintien**
- Des **gants en vinyle**, **1 couverture de survie** et un **sac vomitoire** vous assurent également une protection efficace
- Pour vous aider du petit matériel tels que des **ciseaux trousse**, une **pince à écharde** et un **manuel de 1ers secours** pour vous expliquer les premiers gestes à effectuer.
- Vous pouvez au choix obtenir une trousse **véhicule pleine** avec éthylotest ou une trousse **véhicule vide** ou bien opter pour la **composition seule sans éthylotest**

#### Caractéristiques :

- Les **trousse de secours véhicules** sont **SANS éthylotest**
- Proposées **pleines** ou **vides**. Possibilité de recharger avec la **composition seule**
- **Coffrets résistants** et **légers** avec poignée de transport.
- En polypropylène

### Composition de la trousse véhicule pleine :

Les composants du kit de secours (**produits antiseptiques, pansements, compresses, bandes, sparadraps**) permettent de soigner les coups, les coupures superficielles et les blessures légères. Les victimes peuvent être réanimés dans le respect de l'hygiène à l'aide de masques de protection bouche à bouche. Enfin, d'autres outils de secours comme une pince à écharde, des ciseaux et des sachets plastique viennent compléter la composition.

## TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE - SANS ÉTHYLOTEST

Référence : 10083-SE

• Les **compresses stériles** sont idéales pour une utilisation immédiate après un accident. Elle est conçue pour nettoyer et couvrir les plaies quotidiennes. La compresse stérile peut être pliée ou dépliée en fonction de la taille souhaitée. Une compresse pliée offre un coussin supplémentaire aux petites blessures. Très absorbante et respirante.

• Le **sparadrap microporeux** est un adhésif hypoallergénique idéal pour les peaux sensibles ainsi que pour les pansements à renouvellement fréquent.

• Les **serviettes coups et chocs** à base de Calendula permettent d'apaiser la douleur causée suite à un choc.

• Le **gel hydroalcoolique** s'utilise sur des mains propres et nécessitent au minimum 30 secondes de friction. Il garantit une hygiène parfaite des mains.

• Le **sérum physiologique** permet de nettoyer les zones sensibles comme les yeux et le nez, permettant d'éviter la prolifération d'agents infectieux dans le corps. Produit nettoyant, inoffensif pour le corps.

• La **couverture de survie** est essentielle pour assurer la sécurité des personnes après une chute ou un traumatisme tout en empêchant la chute de leur température corporelle.

• Les **paires de gants en vinyle** offre une protection efficace lors des interventions de soins et ils sont tout indiqués dans la pratique des gestes d'urgence.

• Le **ciseau pour trousse** possède une taille parfaitement adaptée au petit format d'une trousse de secours.

• La **pince à échardes** est conçue aussi bien pour le retrait des échardes que pour l'épilation. La prise en main ergonomique permet une extraction efficace des échardes et poils.

• Le **manuel de premiers secours** explique les positions et les gestes de premiers secours à adopter face aux accidents les plus courants : étouffement, coupures, brûlures, malaises, etc.



## TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE - SANS ÉTHYLOTEST

Référence : 10083-SE

### Trousse de secours Véhicule - sans éthylotest

Les **trousSES de secours véhicule** sont proposées **pleines** ou **vides SANS éthylotest**. Vous pouvez également vous procurer uniquement la **composition** pour **recharger votre trousse de secours** ou la **trousse de secours avec éthylotest**.

Les trousseS de secours permettent de réagir en tant que témoin ou victime face à un accident plus ou moins grave, notamment lors de l'utilisation d'une voiture, d'une moto ou d'un véhicule en cas d'urgence.

Les règles concernant l'emplacement de la trousse d'urgence diffèrent selon qu'il s'agit d'une voiture de fonction ou d'un véhicule personnel. Cependant, il est recommandé à chacun, que ce soit sur de courts ou de longs trajets, de s'équiper d'une trousse de secours pour véhicule.

#### **Produits référents :**

- [Trousse véhicule sans éthylotest pleine](#) - Réf:10083-SE
- [Trousse véhicule vide](#) - Réf:10002
- [Composition sans éthylotest](#) (sans trousse) - Réf:10084-SE

#### **Est-il obligatoire d'avoir une trousse de secours dans sa voiture ?**

La réglementation exige que tout véhicule professionnel soit équipé d'une trousse de premiers soins, mais il est actuellement fortement conseillé aux conducteurs privés d'emporter une boîte avec des fournitures de premiers soins. Différentes situations peuvent survenir pendant le voyage et avoir une trousse ou une trousse de premiers soins peut vous aider à sauver la vie d'autres personnes avant l'arrivée des sauveteurs.



## TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE - SANS ÉTHYLOTEST

Référence : 10083-SE

### Utiliser sa trousse de secours sur la route

Les blessures mineures ou graves causées par des accidents de la circulation ne sont pas les seules choses à craindre ! Vous serez rassuré à l'idée d'avoir une trousse de secours à bord. Grâce à votre trousse de secours, vous pourrez faire face aux coupures aux doigts qui vous gênent au volant. Cette trousse de premiers soins peut également vous permettre de panser la plaie au genou de votre passager.

### Pour une trousse de secours toujours opérationnelle

Toutes les entreprises sont exposées au risque d'accident du travail, quels que soient leur taille ou leur secteur d'activité. La présence d'une trousse de premiers soins ou d'une armoire à pharmacie limite l'étendue des dommages causés par des lésions, des blessures ou des brûlures qui peuvent survenir n'importe quand et n'importe où. Il est nécessaire d'être préparé à toutes les éventualités possibles, surtout lorsqu'il s'agit de la santé et de la sécurité en entreprise. C'est pourquoi une trousse de premiers soins est un article indispensable. L'intérêt est d'être préparé à un accident, qu'il soit mineur ou majeur.

### Vérifier les dates de péremptions des produits

Une attention particulière doit donc être portée à la durée des produits. De très nombreux produits ont une date de péremption mais il faut être attentif notamment aux pansements, aux compresses, aux antiseptiques, gels à base d'arnica, gels brûlures, spray froid, sérum physiologique.... Les produits périmés ne peuvent plus être utilisés et sont donc à remplacer.

### La vérification de votre matériel de secours vous permet :

- d'attester de l'état actuel des produits pour maintenir à jour le contenu de la trousse de premiers soins.
- de découvrir si un équipement de secours supplémentaire est nécessaire pour remplacer les produits manquants.

Idéalement, nous vous recommandons d'effectuer ces vérifications selon une fréquence



## TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE - SANS ÉTHYLOTEST

Référence : 10083-SE

d'évaluation appropriée d'une fois par semestre, accompagnée systématiquement d'un autre contrôle du contenu après l'utilisation de la trousse.

Pour faciliter ces vérifications, vous pouvez créer des alertes sur votre planning. Vous pouvez également sceller votre kit médical à l'aide de [nos scellés amovibles](#), de sorte que vous puissiez vérifier si la trousse a été utilisée. C'est une technique qui permet de contrôler la validation du contenu et qui encourage les ajouts de nouveaux produits.

De plus, nous vous recommandons de désigner une personne responsable de l'inspection et de l'entretien de la trousse de premiers soins.

### Les conseils Tamô pour utiliser correctement votre trousse de premiers soins

1. Optez en priorité pour les unidoses : Le conditionnement unidose stérile permet d'éviter toute contamination lors des différentes utilisations de la trousse d'urgence.
2. Lavez-vous les mains : Veillez à avoir les mains propres avant d'ouvrir le kit et de toucher le matériel. Si nécessaire, utilisez des gants jetables pour nettoyer et panser la plaie d'un collègue.
3. Gardez le kit en bon état : Entretenez régulièrement votre trousse de secours et si nécessaire, désignez une personne pour vérifier périodiquement le contenu, la date de péremption et l'état général de l'équipement.
4. Contactez le Samu en cas d'accident grave : Les trousse de premiers soins sont conçues pour traiter les accidents et blessures mineurs. En cas d'incident plus grave, il faut impérativement : contacter Samu (15) en urgence et suivre les consignes données au téléphone.

### Où Stocker le Matériel de Premiers Soins ?

Les consommables nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes d'un accident et malades doivent être **déposés à un endroit stratégique et facilement accessible aux secouristes**, de sorte à être placés au plus proche de la zone dangereuse (ex : douches de sécurité, à proximité des produits chimiques dans les postes de manutention des produits).



## TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE - SANS ÉTHYLOTEST

Référence : 10083-SE

Dans tous les cas, les salles de secours et [le matériel de premier secours doivent être distingués par la signalisation](#) (rectangles ou carrés et pictogrammes blancs sur fond vert) décrite dans l'arrêté du 4 novembre 1993.

### **Est-il légalement nécessaire d'avoir un local dédié au matériel de premiers secours ?**

L'[article 4214-23 du code du travail](#) stipule qu'un local de soins doit être installé sur le lieu de travail lorsque le nombre total de salariés dans l'entreprise est au moins égal à 200 dans les établissements industriels et au moins 500 dans les autres établissements. Ce local dédié aux premiers secours doit être facilement accessible à l'aide d'un brancard et peut contenir des trousse et du matériel de premiers secours.

Il doit y avoir un dispositif d'appel destiné à alerter les infirmières dans la salle d'urgence ou autour des équipements d'urgence ou, à défaut, une structure d'urgence à l'extérieur de l'établissement. La mise à disposition et l'utilisation du matériel de premiers secours ne constitue en effet qu'une partie de l'organisation des secours et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'appel aux secours d'urgence.

### **Créer votre propre trousse de secours sur mesure**

Parce que personne d'autre que vous ne connaît mieux les risques rencontrés par vos salariés, Tamô vous accompagne dans l'assemblage de votre kit de secours sur mesure. Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche en vous faisant une composition spéciale avec les produits que vous souhaitez ou qui vous sont recommandés par votre Médecin du travail. Nous mettons à votre disposition l'ensemble de toutes les catégories d'articles entrant dans la composition d'une trousse. Vous pourrez opérer votre choix entre des formes variées de sérums physiologiques, de compresses ou encore de pansements. Vous avez également la possibilité de sélectionner des instruments de mesure ou du matériel à usage unique. Nous incluons dans chaque trousse un guide sur les premiers soins.

Faites dès maintenant l'acquisition de votre trousse sur mesure en nous contactant par mail à [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) ou par téléphone au 04.93.19.20.23.