

FILET DE MAINTIEN 2 DOIGTS/POUCE ADULTE N°0.5 Référence : 3032-0.5



Description :

- Filet tubulaire pour doigts/pouce assurant la tenue des pansements sans ruban adhésif.
- Maille aérée qui laisse respirer la peau et favorise le confort au port.
- Élasticité élevée permettant d'épouser l'anatomie sans glisser.
- Pose et dépose rapides, pratique au poste de soins et en mobilité.
- Convient aux gestes répétés grâce à une bonne résistance à l'étirement.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 3032-0.5.
- **Taille** : n°0.5 adulte (2 doigts/pouce).
- **Largeur à plat** : environ 1,8 cm.
- **Longueur rouleau** : 25 m à découper.
- **Matière** : bande extensible en tissu, maille aérée, hypoallergénique.
- **Entretien** : lavable et stérilisable selon protocole interne.
- **Usage** : maintien de compresses et protection des plaies.

Filet de maintien 2 doigts/pouce adulte n°0.5 : fixation rapide sans comprimer

Bandage tubulaire extensible pour maintenir compresses et pansements au niveau des doigts ou du pouce sans gêner les mouvements, en rouleau économique pour une découpe à la longueur souhaitée.

- **Mise en place très rapide.**
- **Maintien fiable des compresses.**
- **Extensible et aéré.**
- **Hypoallergénique, bien toléré.**
- **Ne comprime pas la circulation.**

Maintien des pansements au doigt : confort, aération et tenue

Spécialement adapté aux doigts et au pouce, le filet tubulaire n°0.5 assure une fixation stable des compresses tout en préservant la mobilité. Sa maille aérée et son élasticité limitée évitent la macération et ne perturbent pas la circulation.

En rouleau de 25 mètres, il se découpe à la longueur désirée pour s'intégrer facilement aux protocoles de soins, en infirmerie, cabinet ou trousse d'intervention.



FILET DE MAINTIEN 2 DOIGTS/POUCE ADULTE N°0.5

Référence : 3032-0.5

Mode d'emploi :

- Nettoyez, désinfectez et couvrez la plaie avec une compresse adaptée.
- Coupez la longueur nécessaire de filet pour entourer la zone.
- Glissez le filet sur les deux doigts ou le pouce et ajustez la tension.
- Rabattez éventuellement une seconde couche pour renforcer le maintien.
- Remplacez dès que le pansement est humide, sali ou lors du renouvellement de soins.

Précautions d'utilisation :

- Vérifiez que la circulation n'est pas entravée après la pose.
- N'appliquez pas directement sur une plaie ouverte sans compresse.
- Stoppez l'usage en cas d'irritation ou d'inconfort persistant.
- Lavez et/ou stérilisez selon votre protocole si réutilisation interne autorisée.
- Conservez au sec, à l'abri de la chaleur et des contaminations.