

## OXYMÈTRE DE POULS PÉDIATRIQUE

Référence : 22053P

Oxymètre de pouls portable digital



Oxymètre de pouls portable digital PÉDIATRIQUE (A partir de 2 ans) affichage 2 couleurs

### Mode d'emploi

Enlevez le film protecteur du cadran. Insérez les piles en respectant les pôles. Appuyez sur la pince, placez un doigt, de préférence l'index, dans l'ouverture et relâchez le capot. Appuyez une fois sur l'interrupteur (bouton noir), situé sur le panneau avant. Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage. Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil.

### Nettoyage

Avec un chiffon sec ou légèrement humidifié avec du savon. Lors du nettoyage, il faut veiller à ce que le liquide ne pénètre en aucun cas dans l'appareil et les capteurs. Vérifier bien que le capteur n'est pas bouché par de la saleté.

### Précaution d'emploi

Le doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne, attention dans le cas d'un vernis à ongle, les données peuvent être erronées. Certaines mesures peuvent être erronées suite à une mauvaise lecture due notamment, saletés sur la diode de lecture, doigt sale, transpiration importante, ongles abîmés ou noircis.

### Caractéristiques :

Modèle pour enfants à partir de 2 ans environ (épaisseur du doigt : 5 mm).

Ecran 2 couleurs et 6 modes d'affichage.

Indicateur de batterie faible.

Mesures : SpO2 : 70 à 100% : de 70 à 99% précision à +/- 3% et de 80 à 100% précision à +/- 2%.

Pouls : 30 à 235 bpm précision à +/- 1 bpm.

Poids : 50 g (avec piles). Livré avec dragonne et piles (2 x LR03).

Dimensions Lo x La x H (mm) : 50x29x28mm

Résistance température : -10 à 40C

Poids : 25g

Couleur : Gris et bleu

Affichage : Ecran LED avec pivotage et agrandissement + affichage état de la batterie

CE0123