

## HEXANIOS G+R BIDON DE 5 L AVEC POMPE DOSEUSE 25ML Référence : 23013



Nettoyage et pré-désinfection des instruments

Hexanios G + R est un nettoyant pré-désinfectant à action détergente renforcée.

Cette formule contient également un inhibiteur de corrosion. Indispensable avant toute phase de stérilisation. Parfumé au citron. Utilisable en bac à ultrasons.

### INDICATIONS

Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

### COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries : EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727) : 5 minutes.

NF T 72-190, T 72-300 (A. baumannii) : 15 minutes.

Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.): 15 minutes.

Levures : EN 1275, EN 13624 : 5 minutes.

Virus : BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus : 5 minutes.

HIV-1, HBV : 10 minutes.

### MODE D'EMPLOI

Dilution à 0,5 % :



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## HEXANIOS G+R BIDON DE 5 L AVEC POMPE DOSEUSE 25ML Référence : 23013

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

Immerger complètement le dispositif médical.

Temps de trempage conseillé : 15 min.

Brosser si nécessaire. Pour le matériel endoscopique : double nettoyage : 10 et 5 minutes. Ecouvillonner. Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (bonne qualité microbiologique). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur. Essuyer avec un champ propre.

Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502