


ANIOSPRAY SURF 29 BIDON DE 5 LITRES POUR RECHARGE

Référence : 23005-5L

Sans rinçage, prêt à l'emploi.

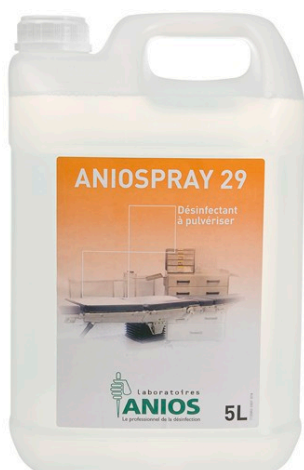

INDICATIONS

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 : 5mn

Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 : 5mn

Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 30mn

Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus : 1mn

MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS Premium.

Pulvériser sur les surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie. (Volume à pulvériser : 80 ml/m²).

Laisser la pièce fermée (portes et fenêtres) pendant 5 minutes minimum.

Aérer si possible avant réutilisation.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ANIOSPRAY SURF 29 BIDON DE 5 LITRES POUR RECHARGE

Référence : 23005-5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit biocide - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502