

FLACON LAVE-OEIL 500ML PLUM

Référence : 24041



Description :

- Élimine rapidement impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles, huiles et solvants.
- Œillère ergonomique assurant un flux de rinçage efficace et ciblé.
- Flacon prêt à l'emploi, manipulation intuitive en situation d'urgence.
- Compatible avec les besoins de premiers secours en milieu professionnels.
- Format 500 ml pour un rinçage continu d'environ 5 minutes.

Caractéristiques techniques :

- **Solution** : chlorure de sodium stérile 0,9 % (similaire au liquide lacrymal).
- **Contenance** : 500 ml (rinçage ~5 min).
- **Conception** : flacon à ouverture facile avec œillère ergonomique.
- **Usage** : rinçage d'urgence de l'œil en cas de corps étrangers/contaminants.
- **Marque** : PLUM (gamme lave-œil et recharges).

Flacon lave-œil 500 ml plum : rinçage oculaire rapide et efficace

Flacon lave-œil 500 ml PLUM : solution stérile à 0,9 % NaCl avec œillère ergonomique pour un flux précis, pensée pour éliminer poussières, copeaux, limailles, huiles et solvants en quelques minutes.

- **Solution stérile NaCl 0,9 %**
- **Œillère ergonomique dédiée**
- **Ouverture/usage faciles**
- **Rinçage continu ~5 minutes**
- **Idéal ateliers & chantiers**

Mode d'emploi :

- Ouvrir le flacon, placer l'œillère sur l'œil atteint et basculer la tête vers l'arrière.
- Presser pour lancer un **rinçage continu** pendant ~5 minutes ou jusqu'à intervention d'un professionnel.
- Maintenir l'œil ouvert ; cligner régulièrement pour favoriser l'évacuation des particules.
- En cas de contact chimique, poursuivre le rinçage selon protocole interne et consulter rapidement.
- Remplacer le flacon utilisé afin de garder une dotation opérationnelle.



FLACON LAVE-OEIL 500ML PLUM Référence : 24041

Précautions d'utilisation :

- Usage oculaire uniquement ; ne pas utiliser si le scellé est endommagé.
- Stocker dans un endroit propre, accessible et identifié.
- Pour acides/bases, l'usage d'une solution tampon pH neutre peut être indiqué *en première intention*, puis rincer au NaCl 0,9 %.
- Consulter un professionnel de santé après toute exposition à un produit chimique.

Rinçage oculaire immédiat pour ateliers, chantiers et postes de travail

Le **flacon lave-œil 500 ml PLUM** apporte une réponse simple et rapide aux projections de **poussières, copeaux, limailles, huiles et solvants**, grâce à une solution stérile **NaCl 0,9 %** et à une **œillère ergonomique** pour diriger le flux. Le volume 500 ml permet un **rinçage continu d'environ 5 minutes** pour un premier geste efficace.

Compact et prêt à l'emploi, il complète les **stations lave-œil** et les **troussets d'urgence**, et s'intègre facilement aux procédures de **premiers secours** sur site.