

MASQUE BOUCHE À BOUCHE LAERDAL

Référence : 8023

MASQUE DE POCHE AVEC ETUI RIGIDE LAERDAL

Caractéristiques:



Protection supplémentaire grâce à la valve unidirectionnelle et au filtre
Bourrelet pré-gonflé pour faciliter l'application et offrir une parfaite
étanchéité
Peut être utilisé sur l'adulte, l'enfant et le nourrisson
Sans latex

Réutilisable. Livré avec serviette désinfectante et paire de gants nitrile

MASQUE DE POCHE AVEC ETUI RIGIDE LAERDAL

Le masque de poche LAERDAL est très pratique. Vous pouvez le laisser dans votre poche, soit accroché à votre ceinture dans sa pochette souple.

Il allie une valve unidirectionnelle de faible résistance pour empêcher le passage des liquides et de sécrétions.

Livré avec serviette désinfectante et paire de gants nitrile

Lavable et réutilisable:

1. Lavez et frotter le masque dans l'eau chaude savonneuse. Rincer le à l'eau claire pendant au moins 1 minute.
2. Immergez le pendant 10 minutes dans une solution hypochlorite de sodium 0.5% (réf 90021).
3. Rincez le à l'eau claire pendant 3 minutes
4. Laissez sécher complètement