

## MASQUE BOUCHE À BOUCHE LAERDAL Référence : 8023

### MASQUE DE POCHE AVEC ETUI RIGIDE LAERDAL

#### Caractéristiques:



Protection supplémentaire grâce à la valve unidirectionnelle et au filtre  
Bourrelet pré-gonflé pour faciliter l'application et offrir une parfaite  
étanchéité  
Peut être utilisé sur l'adulte, l'enfant et le nourrisson  
Sans latex  
Réutilisable. Livré avec serviette désinfectante et paire de gants nitrile

### MASQUE DE POCHE AVEC ETUI RIGIDE LAERDAL

Le masque de poche LAERDAL est très pratique. Vous pouvez le laisser dans votre poche, soit accroché à votre ceinture dans sa pochette souple.

Il allie une valve unidirectionnelle de faible résistance pour empêcher le passage des liquides et de sécrétions.

Livré avec serviette désinfectante et paire de gants nitrile

Lavable et réutilisable:

1. Lavez et frottez le masque dans l'eau chaude savonneuse. Rincez-le à l'eau claire pendant au moins 1 minute.
2. Immergez-le pendant 10 minutes dans une solution hypochlorite de sodium 0.5% (réf 90021).
3. Rincez-le à l'eau claire pendant 3 minutes.
4. Laissez sécher complètement.