

## SPRAY NETTOYANT DÉSINFECTANT 750ML S3DM Référence : 23017



### Nettoyant désinfectant spray 750ml

#### **Propriétés microbiologiques:**

- Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min.
- Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus\* en 1 mn, Rotavirus\* en 15 mn.

#### **Mode d'emploi:**

Pulvériser STERICID sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm.

Bien répartir le produit. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.

### Nettoyant désinfectant Spray 750ml

Désinfectant pour les surfaces, le petit matériel et dispositifs médicaux non invasifs.

Vous pouvez procéder au nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergés et non invasifs soit les capteurs de pression, connectiques et câbles, teste de glycémie, sondes échographiques,...

Il peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant