

PACK DE 5 PAIRES D'ÉLECTRODES FORMATION PÉDIATRIQUE SAVER ONE Référence : 29062

Electrode de formation de recharge (uniquement la partie adhésive)
Réutilisable 100 fois environ.



Entretien des électrodes

- Garder le côté avec gel des électrodes propre et sans poussière.
- Après leur utilisation, coller les électrodes sur leur support original.
- Si l'adhésivité des électrodes diminue, les rincer quelques secondes sous l'eau, puis les laisser sécher.
- Ne pas essuyer le côté avec gel des électrodes au moyen d'un essuie-tout ou d'un linge.
- Ne pas rayer le côté avec gel des électrodes (par ex., avec un clou ou une brosse).
- Les électrodes peuvent normalement être utilisées à plusieurs reprises.
- Ne pas laver les électrodes trop souvent et éviter l'eau chaude et les détergents.
- Éviter de ranger les électrodes dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à des taux d'humidité élevés.