

AIGUILLES INTRAMUSCULAIRE USAGE UNIQUE

Référence : 16007



Description :

- Aiguilles hypodermiques **stériles**, à usage unique.
- Spécialement conçues pour les **injections intramusculaires** (voie d'administration).
- Adaptée aux **enfants** et aux **adultes**.
- Paroi mince pour une **insertion en douceur**.
- **Embase translucide en polypropylène** pour une meilleure visibilité.

Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : Sachet de 100
- **Stérilisation** : Stérilisé
- Usage unique
- Dispositif médical de **classe IIa**

Aiguilles intramusculaires stériles pour injections

Les **aiguilles intramusculaires stériles** à usage unique sont conçues pour une **utilisation précise et en douceur**, elles garantissent une **injection sans douleur**.

- **Aiguilles hypodermiques stériles**
- **Injections intramusculaires**
- **Adaptée aux enfants et aux adultes**
- **Insertion sans douleur**
- **Embase translucide en polypropylène**

Utilisation du produit :

- **Utiliser une nouvelle aiguille stérile** pour chaque injection.
- Choisir la taille d'aiguille appropriée (diamètre et longueur) en fonction de **l'âge du patient**, de la **zone d'injection** et de l'actif à administrer.
- **Désinfecter soigneusement la zone d'injection** avant de procéder
- Insérer l'aiguille selon un angle de 90 degrés par rapport à la peau
- Injecter lentement et régulièrement

Précautions d'emploi :

- **Ne pas réutiliser les aiguilles.**
- Jeter les aiguilles usagées dans un **conteneur approprié** pour objets tranchants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulter un professionnel de santé.
- Tenir hors de portée des enfants.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

AIGUILLES INTRAMUSCULAIRE USAGE UNIQUE

Référence : 16007

Indications :

- Administration par voie intramusculaire
- Idéales pour le personnel soignant en **milieu hospitalier**, en **clinique** ou à **domicile**

Retrouvez également l'ensemble de nos [aiguilles à usage unique](#).

Questions Fréquentes

Q1 : Comment faire une injection intramusculaire ?

Q2 : Quelle aiguille pour injection intramusculaire ?

Q3 : Quelle taille d'aiguille intramusculaire ?

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502