

## VISIÈRE ANTI-PROJECTIONS

Référence : 19061

### VISIÈRE ANTI-PROJECTIONS



#### **Normes:**

Le produit a été créé et fabriqué incluant les parties applicables de la norme SS -EN-166, et des normes connexes SS-EN-167 et SS-EN-168.

- Toutefois, le produit n'a pas été testé ou certifié par un organisme de certification officiellement agréé.
- Il ne répond donc pas aux exigences de ces normes.
- Par conséquent, Abena ne délivre pas de marquage CE pour ce produit.

#### **Conseil d'entretien:**

L'écran facial peut être nettoyé avec un produit désinfectant (type éthanol) et un chiffon doux.

- L'utilisation d'une solution à base d'éthanol est recommandée (tests réalisés par le fabricant avec éthanol 90% ).
  - Selon les tests pratiqués par le fabricant, l'écran PET et la bande en polyuréthane ont une bonne résistance à l'éthanol. Toutefois, il est strictement interdit de plonger intégralement la visière dans une solution désinfectante ou alcoolisée car cela altérerait la bonne adhérence de la bande adhésive.
- Conseils

### VISIÈRE ANTI-PROJECTIONS

La visière les protège des projections et des éclaboussures de liquides.

- Visière de protection réglable
- A usage unique, non stérile
- Ajustable à la circonférence de la tête par système de coulisse
- Composée de 4 éléments:
  1. cran facial en PET 0,3 mm
  2. ande frontale en mousse polyuréthane 40 x 25 x 210 mm
  3. ordelette élastique d'ajustement (diamètre entre 2,2 et 3mm; longueur 500mm)
  4. Cercle en plastique PVC coloris noir
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur): 22 x 32 x 4 cm