

POMPE ANTI-VENIN VENIMEX

Référence : 12015



Description :

- Pompe aspirante avec déclenchement automatique par simple pression sur la peau.
- Maniement à une main pour une mise en œuvre immédiate après piqure ou morsure.
- Limite la diffusion locale en créant une dépression ciblée.
- Format compact pour trousse de secours, sac de rando et activités outdoor.
- Entretien simple avec embouts amovibles à nettoyer après usage.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 12015.
- **Déclenchement** : automatique par pression sur la peau.
- **Utilisation** : d'une seule main.
- **Embouts** : 2 tailles incluses.
- **Durée d'application** : environ 1 minute (insectes/araignées) ; 3 à 5 minutes (vives).
- **Positionnement** : premier geste d'aspiration en attendant un avis médical.
- **Conditionnement** : unité prête à l'emploi.

Pompe anti-venin Venimex : aspiration automatique immédiate

Dispositif d'aspiration à déclenchement automatique utilisable d'une seule main, conçu pour limiter la diffusion locale après piqûres d'insectes, morsures d'araignées ou piqûres de vives en attendant l'évaluation médicale.

- **Déclenchement automatique.**
- **Utilisable à une main.**
- **2 embouts fournis.**
- **Geste rapide sur le terrain.**
- **Compact et léger.**

Secours outdoor et trousse de rando : geste simple et efficace

La Venimex combine un déclenchement automatique et une prise en main à une seule main pour un usage intuitif sur le terrain. Sa compacité et ses deux embouts en font un indispensable des [trousses nature](#), plages et zones à risques.

Ce dispositif d'aspiration s'intègre à vos protocoles de premiers secours pour agir rapidement avant l'évaluation par un professionnel de santé.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

POMPE ANTI-VENIN VENIMEX

Référence : 12015

Mode d'emploi :

- Agissez dès que possible après la piqûre ou la morsure.
- Choisissez l'embout adapté et placez-le au centre de la zone.
- Appuyez la pompe contre la peau pour déclencher automatiquement l'aspiration.
- Maintenez environ 1 minute (insectes/araignées) ou 3 à 5 minutes (vives).
- Nettoyez la zone, surveillez les signes d'alerte et consultez si nécessaire.

Précautions d'utilisation :

- N'utilisez pas sur muqueuses, yeux, plaies profondes ou zones infectées.
- N'incisez pas, n'appliquez pas de garrot et n'effectuez pas de succion orale.
- Arrêtez en cas de douleur, d'irritation ou de malaise et demandez un avis médical.
- Nettoyez les embouts après usage selon votre protocole d'hygiène.
- Conservez au sec, à l'abri de la chaleur, et tenez hors de portée des enfants.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502