

## POMPE ANTI-VENIN VENIMEX

Référence : 12015



### Description :

- Pompe aspirante avec déclenchement automatique par simple pression sur la peau.
- Maniement à une main pour une mise en œuvre immédiate après piqûre ou morsure.
- Limite la diffusion locale en créant une dépression ciblée.
- Format compact pour trousse de secours, sac de rando et activités outdoor.
- Entretien simple avec embouts amovibles à nettoyer après usage.

### Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 12015.
- **Déclenchement** : automatique par pression sur la peau.
- **Utilisation** : d'une seule main.
- **Embouts** : 2 tailles incluses.
- **Durée d'application** : environ 1 minute (insectes/araignées) ; 3 à 5 minutes (vives).
- **Positionnement** : premier geste d'aspiration en attendant un avis médical.
- **Conditionnement** : unité prête à l'emploi.

## Pompe anti-venin Venimex : aspiration automatique immédiate

Dispositif d'aspiration à déclenchement automatique utilisable d'une seule main, conçu pour limiter la diffusion locale après piqûres d'insectes, morsures d'araignées ou piqûres de vives en attendant l'évaluation médicale.

- **Déclenchement automatique.**
- **Utilisable à une main.**
- **2 embouts fournis.**
- **Geste rapide sur le terrain.**
- **Compact et léger.**

## Secours outdoor et trousse de rando : geste simple et efficace

La Venimex combine un déclenchement automatique et une prise en main à une seule main pour un usage intuitif sur le terrain. Sa compacité et ses deux embouts en font un indispensable des [trousses nature](#), plages et zones à risques.

Ce dispositif d'aspiration s'intègre à vos protocoles de premiers secours pour agir rapidement avant l'évaluation par un professionnel de santé.



## POMPE ANTI-VENIN VENIMEX

Référence : 12015

### Mode d'emploi :

- Agissez dès que possible après la piqûre ou la morsure.
- Choisissez l'embout adapté et placez-le au centre de la zone.
- Appuyez la pompe contre la peau pour déclencher automatiquement l'aspiration.
- Maintenez environ 1 minute (insectes/araignées) ou 3 à 5 minutes (vives).
- Nettoyez la zone, surveillez les signes d'alerte et consultez si nécessaire.

### Précautions d'utilisation :

- N'utilisez pas sur muqueuses, yeux, plaies profondes ou zones infectées.
- N'incisez pas, n'appliquez pas de garrot et n'effectuez pas de succion orale.
- Arrêtez en cas de douleur, d'irritation ou de malaise et demandez un avis médical.
- Nettoyez les embouts après usage selon votre protocole d'hygiène.
- Conservez au sec, à l'abri de la chaleur, et tenez hors de portée des enfants.