

TEST DE MOATTI

Référence : 210221



Description :

- Test de réaction auditive basé sur des sons d'animaux de fréquences spécifiques
- Idéal pour une détection rapide des troubles auditifs chez l'enfant
- Favorise des réactions optimales : sourire, surprise, pleurs synchrones
- Manipulation discrète pour éviter tout stimulus visuel
- Facilite le suivi et l'orientation vers des spécialistes en audiologie en cas d'absence de réponse

Caractéristiques techniques :

- **Sons disponibles : oiseau, chat, mouton, vache**
- **Fréquences précises : de 500 Hz à plus de 2000 Hz**
- **Format compact et facilement transportable**
- **Utilisation dans des environnements calmes pour des résultats optimaux**
- **Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.**
- Notice d'utilisation incluse.

Test auditif moatti : une solution professionnelle pour évaluer les capacités auditives

Un test fiable et validé pour une évaluation précise des réactions auditives des jeunes enfants, basé sur le protocole établi par la Haute Autorité de Santé. Reconnu et utilisé dans les écoles pour dépister la surdité chez l'enfant de 6 à 24 mois.

- **conçu par des experts en pédiatrie auditive**
- **réponse fiable aux besoins des spécialistes de la petite enfance**
- **évaluation simple, adaptable à divers environnements**
- **calibration sonore constante pour une analyse efficace**
- **recommandé par des professionnels de la santé**

Mode d'emploi :

- Émettre le son de l'oiseau (> 2000 Hz) comme premier test
- Suivre avec le son du chat (1000 Hz) pour évaluer les fréquences moyennes
- Continuer avec le son du mouton (500 Hz) et finir avec celui de la vache (250 Hz) pour tester les basses fréquences
- Observer la réaction de l'enfant à chaque son : sourire, surprise ou pleurs synchrones



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

TEST DE MOATTI

Référence : 210221

Précautions d'utilisation :

- Assurer une atmosphère calme et exempte de distractions
- Positionner l'opérateur derrière l'enfant pour éviter tout stimulus visuel
- Éviter d'interrompre le test avec des bruits ou distractions extérieures
- Ne pas répéter les sons de manière intempestive pour garantir des réactions naturelles
- Orienter vers un centre d'audiologie si aucune réaction n'est observée après plusieurs tentatives

Pourquoi choisir le test auditif moatti pour les enfants ?

Le test auditif Moatti est une solution recommandée pour les professionnels qui souhaitent évaluer les réactions auditives de jeunes enfants de manière fiable et rapide.

Avec des sons de fréquences spécifiques – allant de l'imitation de l'oiseau à celle de la vache – ce test permet de détecter les réponses comportementales adaptées, facilitant ainsi une détection précoce des possibles troubles auditifs.

Un outil incontournable pour les spécialistes en pédiatrie auditive.

Retrouvez également l'ensemble de nos [tests auditifs](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502