

## BATTERIE DÉFIBRILLATEUR DÉFIBTECH

### Référence : 29017

#### Description :



- Batterie opérationnelle conçue pour alimenter les défibrillateurs Lifeline DEA et DSA en situation réelle d'arrêt cardiaque.
- Autonomie indicative de 5 ans en veille ou jusqu'à 125 chocs, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels.
- Bloc livré avec une pile lithium 9V qui prend en charge les auto-tests indépendamment de la batterie principale.
- Système d'alerte visuelle et sonore signalant un niveau de batterie faible pour anticiper le remplacement.
- Solution simple à installer, idéale pour assurer une disponibilité continue de votre défibrillateur Lifeline dans vos locaux.

#### Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : défibrillateurs DEA-DSA Lifeline Defibtech (automatique et semi-automatique).
- **Durée de vie** : environ 5 ans en veille ou 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation continue.
- **Puissance** : batterie 15 V, 1400 mAh, technologie dioxyde de lithium/manganèse.
- **Indicateur** : signal de batterie faible visuel et sonore intégré au défibrillateur.
- **Type** : bloc batterie jetable, recyclable et non rechargeable, livré avec pile 9 V lithium.

## Batterie défibrillateur Lifeline : autonomie longue durée pour votre DAE

Prolongez la disponibilité de votre défibrillateur Lifeline grâce à une batterie officielle offrant jusqu'à 5 ans de veille ou 125 chocs, livrée avec pile 9V intégrée pour garantir les auto-tests et un DAE toujours opérationnel.

- **Autonomie 5 ans / 125 chocs**
- **Compatible DEA et DSA Lifeline**
- **Bloc livré avec pile 9V**
- **Alerte visuelle et sonore**
- **Jetable et recyclable**

#### Mode d'emploi :

- Vérifier l'état du témoin de fonctionnement du défibrillateur Lifeline et prévoir le remplacement de la batterie lorsque l'alerte de niveau faible apparaît.
- Éteindre le défibrillateur, ouvrir le compartiment batterie et retirer délicatement l'ancien bloc batterie.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## BATTERIE DÉFIBRILLATEUR DÉFIBTECH

### Référence : 29017

- Insérer la nouvelle batterie Lifeline en respectant le sens d'insertion indiqué dans le logement prévu à cet effet.
- Refermer le compartiment, allumer le défibrillateur et contrôler que le voyant de statut repasse au vert après les auto-tests.
- Noter la date de remplacement de la batterie dans votre registre de maintenance afin d'anticiper la prochaine échéance.

#### Précautions d'utilisation :

- Ne pas tenter de recharger la batterie : il s'agit d'un bloc jetable et non rechargeable.
- Manipuler la batterie avec soin, sans l'ouvrir, la percer ni l'exposer à des chocs violents ou à l'immersion dans l'eau.
- Utiliser uniquement une batterie Lifeline compatible recommandée par Defibtech pour garantir la performance du défibrillateur.
- Éliminer les batteries usagées via une filière adaptée aux déchets de piles et accumulateurs (recyclage spécialisé).
- Stocker les batteries de rechange dans un endroit sec, tempéré et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe.

## Une batterie Lifeline fiable pour un défibrillateur toujours prêt

La **batterie défibrillateur Lifeline** est un élément central de la maintenance de votre **défibrillateur automatisé externe**. Grâce à son autonomie de **5 ans / 125 chocs** et à sa pile 9 V intégrée pour les auto-tests, elle garantit que votre DAE reste en veille permanente et qu'il sera prêt à délivrer un choc en cas d'**arrêt cardiaque soudain**. En choisissant une batterie officielle pour vos **défibrillateurs DEA-DSA Lifeline**, vous sécurisez la fiabilité de votre équipement et respectez les recommandations du fabricant.

Idéale pour les **entreprises, collectivités, sites industriels, établissements scolaires ou structures sportives**, cette batterie s'intègre parfaitement dans une politique de **sécurité cardiaque** et de **prévention des risques**. En anticipant le remplacement de vos **consommables DAE** (batterie et électrodes), vous assurez un défibrillateur Lifeline opérationnel et contribuez à améliorer la prise en charge des victimes dans les premières minutes critiques.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502