


## TEST SALIVAIRE DES 5 DROGUES

Référence : 160033

### Avantages du test salivaire multi-drogues :

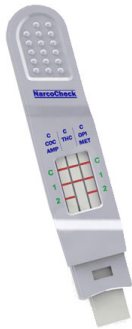

- Le **prélèvement** d'échantillon peut être **supervisé** et supprime tout risque de substitution.
- **Simple à utiliser**, aucun échantillon à manipuler.
- **Résultats visuels** et très **faciles à interpréter**, aucune compétence nécessaire,
- Pas de matériel supplémentaire nécessaire.
- Pas de risque de contamination de l'échantillon.
- Une **détection des stupéfiants très précoce** : dès 10 minutes après consommation,
- Idéal pour une **utilisation en extérieur**.

### Caractéristiques :

- Test salivaire de **dépistage des 5 drogues** : Amphétamines, Ecstasy, Cocaïne, Opiacés (Héroïne), Cannabis
- Test adapté à l'autodépistage
- L'un des plus **précis** actuellement disponibles
- Résultats fiables à plus de **99% en 7 minutes**, en toute intimité et sans échantillon à collecter.

## Test salivaire pour dépistage des 5 drogues

Le test salivaire des 5 drogues permet de détecter simultanément : Amphétamines, Ecstasy, Cocaïne, Opiacés (Héroïne), Cannabis.

- **Multi-drogues tout en un**
- **Simple d'utilisation**
- **Résultats fiables à plus de 99%**
- **Résultats en 7 minutes**
- **Adapté à l'autodépistage**

### Informations complémentaires :

- Les valeurs sont données à titre indicatif mais peuvent varier en fonction de l'âge et du sexe de l'individu mais également de son état de santé général et de sa corpulence.

### Mode d'emploi :

1. Placer la languette en bouche et saliver desus quelques secondes.
2. Le test démarre automatiquement.

## TEST SALIVAIRE DES 5 DROGUES

Référence : 160033

3. Lire les résultats après 10 minutes.

### Lire les résultats :

- **A gauche** : 1 = COC (cocaïne), 2 = AMP (amphétamines)
- **Au centre** : 1 = THC (cannabis)
- **A droite** : 1 = OPI (opiacés, héroïne etc.), 2 = MET (méthamphétamine et ecstasy)
- **C** = les lignes de contrôle; elles doivent toujours être présentes sinon le test est invalide

Lorsqu'une ligne rouge apparaît à côté d'une drogue, même faiblement, le test est négatif pour cette drogue.

Si aucune ligne n'apparaît à côté d'une drogue, le test est positif pour cette drogue.

Test négatif sur toutes les drogues



Test positif pour la cocaïne et le cannabis



Test invalide. Doit être recommencé

