

## GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

### Description

Le **garrot tourniquet tactique militaire** est destiné au contrôle rapide d'une hémorragie externe importante située au niveau d'un bras, d'une jambe, d'une main ou d'un pied. Sa sangle large permet de comprimer l'artère du membre atteint afin de limiter efficacement la circulation sanguine.



Ce modèle est conçu pour être posé d'une seule main. Cette caractéristique facilite son utilisation par une victime elle-même ou par un intervenant isolé, lorsque la situation impose une action rapide avant la prise en charge par les secours.

En cas d'urgence, le garrot peut être appliqué par-dessus les vêtements lorsqu'il n'est pas possible d'exposer immédiatement la plaie. Sa sangle d'environ 1 mètre de long et 5 cm de large offre une base de compression adaptée aux hémorragies graves des membres.

La zone velcro blanche intégrée à la sangle permet de noter clairement **l'heure de pose du garrot**. Ce repère est essentiel pour transmettre une information lisible aux équipes de secours lors de la prise en charge.

### Caractéristiques techniques

- Référence 14070
- Usage principal Contrôle rapide d'une hémorragie externe importante sur un membre
- Type de risque Hémorragies externes graves des membres
- Dimensions Sangle d'environ 1 m de long et 5 cm de large
- Matériaux Matériaux robustes et durables
- Format Compact, facile à porter

### Propriétés du garrot tourniquet

Ce garrot associe une **sangle large**, un mécanisme de torsion et un système de blocage permettant de maintenir la compression une fois le serrage effectué. Sa conception robuste est adaptée aux conditions difficiles sur le terrain. La bande velcro blanche intégrée sert à inscrire l'heure de mise en place, afin de conserver une information claire pendant toute la durée de l'intervention.

## GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

### Garrot tourniquet tactique militaire : contrôle rapide des hémorragies graves

**Garrot tourniquet tactique militaire** conçu pour stopper rapidement une hémorragie externe importante sur un membre, avec une pose possible d'une seule main en situation d'urgence.

- Arrêt rapide des hémorragies
- Pose possible d'une main
- Sangle robuste 1 m
- Heure de pose identifiable
- Format compact à porter

#### Mode d'emploi

- Repérer une hémorragie externe grave sur un membre et alerter les secours avant de mettre en place le garrot.
- Retirer si possible les vêtements ou éléments gênants ; à défaut, positionner le garrot par-dessus le textile, mais jamais sur un objet solide présent dans les vêtements.
- Passer la sangle autour du membre, bien en amont de la plaie, puis la faire coulisser dans la boucle.
- Serrer fortement la sangle, verrouiller la boucle et tourner la poignée de torsion jusqu'à l'arrêt du saignement.
- Bloquer la poignée dans son crochet et noter clairement l'heure de pose sur la zone velcro prévue à cet effet.

#### Précautions d'utilisation

- Réserver la pose du garrot aux hémorragies externes graves ne pouvant pas être contrôlées par une compression directe efficace.
- Positionner le garrot entre la plaie et le tronc, sans le placer sur une articulation ni sur un objet planté dans le membre.
- Une fois l'hémorragie contrôlée, ne pas desserrer le garrot tant que la victime n'est pas prise en charge par les secours.
- Ne pas laisser un garrot en place plus longtemps que nécessaire ; un transport rapide vers une structure de soins est indispensable.
- Se former aux gestes d'urgence et à la pose du garrot tourniquet, puis conserver le dispositif à portée de main dans la trousse ou le sac d'intervention.

### Un garrot tactique pour les urgences hémorragiques sur le terrain

Le **garrot tourniquet tactique militaire** répond à un besoin précis : agir vite face à une hémorragie externe grave sur un membre. Sa sangle large, son mécanisme de torsion et son système de blocage permettent de maintenir une compression efficace en attendant l'arrivée des secours. Pour renforcer un équipement déjà orienté vers ce type de risque, il peut être associé à d'autres [solutions de contrôle d'hémorragie par garrot](#).

Compact et facile à porter, ce tourniquet d'urgence trouve sa place dans un sac d'intervention, une trousse de secours ou un équipement de prévention destiné aux environnements exposés. Sa possibilité de pose d'une seule main et sa zone dédiée à l'inscription de l'heure de pose en font un dispositif utile pour les intervenants formés aux gestes d'urgence. **Ajoutez ce**



## GARROT TOURNIQUET TACTIQUE MILITAIRE

Référence : 14070

**garrot tactique à votre matériel de secours** pour disposer d'une solution adaptée aux situations d'hémorragie externe sévère.

### À quoi sert un garrot tourniquet tactique militaire ?

+

Un garrot tourniquet tactique militaire sert à stopper rapidement une hémorragie externe importante sur un membre. Il agit par compression de l'artère du bras, de la jambe, de la main ou du pied atteint.

### Ce garrot peut-il être posé d'une seule main ?

+

Oui, ce garrot tourniquet peut être posé d'une seule main. Cette conception permet à une victime ou à un intervenant isolé de l'utiliser en autonomie lorsque la situation l'exige.

### Peut-on appliquer ce garrot par-dessus les vêtements ?

+

En cas d'urgence, il peut être appliqué par-dessus les vêtements lorsqu'il n'est pas possible d'exposer immédiatement la plaie. Il ne doit toutefois jamais être positionné sur un objet solide présent dans les vêtements.

### Où positionner le garrot en cas d'hémorragie grave ?

+

Le garrot doit être positionné entre la plaie et le tronc, bien en amont de la blessure. Il ne doit pas être placé sur une articulation ni sur un objet planté dans le membre.

### Pourquoi noter l'heure de pose du garrot ?

+

L'heure de pose permet de transmettre une information claire aux secours lors de la prise en charge. Ce modèle dispose d'une zone velcro blanche prévue pour inscrire cette information directement sur la sangle.