

ÉCHELLE DE MONOYER LECTURE DIRECTE 5M

Référence : 21004

Description :



- Échelle de dépistage visuel pour établir un bilan simple et rapide.
- 10 lignes de lettres, chaque ligne correspondant à 1/10 d'acuité.
- Conception en 3 plaques PVC blanches à suspendre par chaînette.
- Mise en place aisée au mur avec lecture directe à 5 mètres.
- Entretien facile : nettoyage à l'eau savonneuse, sans rayer le lettrage.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 21004.
- **Constitution** : 3 plaques PVC blanc + chaînette de suspension.
- **Épaisseur** : 1 mm.
- **Poids** : 145 g (environ).
- **Lecture** : directe à 5 m, 10 lignes de lettres.
- **Plage de température** : -10 °C à +40 °C.
- **Entretien** : eau savonneuse, ne pas rayer l'impression.
- **Pose** : suspension murale à plat pour une lecture fiable.

Échelle de Monoyer lecture directe 5 m : contrôle visuel rapide et fiable

Test d'acuité à distance avec 10 lignes de lettres, lecture à 5 mètres, composée de 3 plaques PVC blanches reliées par chaînette pour une mise en place simple et durable.

- **Lecture directe à 5 m.**
- **10 lignes = 10/10.**
- **3 plaques PVC + chaînette.**
- **Installation murale rapide.**
- **Nettoyage à l'eau savonneuse.**

Mode d'emploi :

- Dépliez et suspendez l'échelle à environ 180 cm du sol, parfaitement à plat.
- Placez le patient à 5 mètres de l'échelle, bien face au test.
- Commencez par une lecture binoculaire, puis testez chaque œil séparément en masquant l'autre.
- Demandez la lecture de haut en bas jusqu'à la plus petite ligne correctement lue.
- Notez l'acuité par ligne atteinte (1/10 par ligne) selon votre protocole.

Précautions d'utilisation :

- Évitez tout éclairage direct, reflet ou ombre altérant la lecture.
- Assurez-vous que l'échelle soit plane, stable et perpendiculaire à la ligne de regard.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ÉCHELLE DE MONOYER LECTURE DIRECTE 5M

Référence : 21004

- Préservez le lettrage : ne frottez pas avec des abrasifs pour éviter l'effacement.
- Remplacez le produit si l'impression est abîmée ou illisible.
- Stockez à l'abri de l'humidité et dans la plage -10 °C / +40 °C.

Dépistage de l'acuité à 5 mètres pour écoles, entreprises et cabinets

Pratique et robuste, l'échelle de Monoyer à lecture directe 5 m permet un contrôle visuel rapide en milieu scolaire, en entreprise ou en cabinet. Sa construction en plaques PVC et sa chaînette de suspension facilitent la mise en place et le rangement.

La lecture standardisée à 5 mètres et les 10 lignes progressives assurent une évaluation simple de l'acuité, intégrable à vos protocoles de prévention et de suivi.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502