

STERANIOS 2% PRÊT À L'EMPLOI 2LITRES

Référence : 23001-2L



Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi pour usage professionnel. Ne pas diluer. Couvrir le bac et laisser un temps de contact de 10 minutes pour bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries ; et 1 heure pour spores de bactéries. Rincer soigneusement à l'eau stérile ou filtrée après trempage. Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours. Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).