

OTOSCOPE LIGHT FIBRE OPTIQUE

Référence : 22017-17

OTOSCOPE LIGHT FIBRE OPTIQUE



Caractéristiques :

- **Otoscope à fibres optiques NOIR** avec **loupe de grossissement x3**,
- Destiné à l'**examen du conduit auditif** ainsi qu'à l'**éclairage des surfaces** dans le cadre d'examens non-invasifs,
- Il est livré avec sa pochette de rangement + 2 piles AA (LR06) + 1 ampoule Xenon 035 + 4 spéculums 2.5mm + 4 spéculums 4mm,

Composition :

- Polyéthylène haute densité boré de Borotron® HD050 - 5%
- Ampoule Xenon 035

Dimensions :

- Manche : 1127 x Ø23
- Tête : 54 x 44

Précautions d'emplois :

- Ne jamais introduire l'otoscope dans le conduit auditif sans spéculum.
- Nettoyer l'extérieur de la tête de l'otoscope avec un chiffon doux ou avec un chiffon imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 70% ou d'eau faiblement savonneuse. Pour nettoyer l'intérieur de la tête, utiliser un coton-tige sec ou imbibé d'un peu d'alcool.

OTOSCOPE LIGHT FIBRE OPTIQUE

- Destiné à l'examen du conduit auditif
- Otoscope à fibres optiques
- Loupe de grossissement x3

Fonctionne avec des ampoules Réf:22017-17A

Mode d'emploi :

- Mettre le spéculum sur l'otoscope de telle manière que la came à l'intérieur du spéculum épouse la fente type



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30
04 93 19 20 23

OTOSCOPE LIGHT FIBRE OPTIQUE

Référence : 22017-17

baïonnette. Serrer le spéculum en le faisant tourner légèrement sur la droite. Pour allumer et éteindre l'otoscope pousser en avant ou en arrière l'interrupteur noir situé sur le haut du manche.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502