

SPRAY FROID Référence : 7002



Excellente absorption

FICHE TECHNIQUE

PRINCIPES D'ACTION :

LE FROID :

Le gaz refroidisseur est conservé sous pression dans un aérosol, sous forme liquide. Lors de l'utilisation, la détente brutale du gaz le refroidit fortement, ce qui permet d'atteindre des températures de moins 20° C.

Le froid a alors deux effets complémentaires :

INSENSIBILISANT : La sensation de douleur disparaît avec le froid, le spray donne une sorte de soulagement local et permet de diminuer l'effet d'un coup, une entorse, foulure...

CIRCULATION SANGUINE DIMINUEE : Les vaisseaux sanguins se rétractent sous l'effet du froid. La circulation sanguine sur la zone traitée avec diminue et limite le développement important d'hématomes, des enflures lors d'entorses ou de foulures.

LA DUREE :

Le froid procuré par le gaz refroidisseur est prolongé par l'utilisation de MENTHOL qui est un solide qui a pour propriété de s'évaporer lentement en refroidissant. Le MENTHOL est dissous dans le gaz refroidisseur, et à la pulvérisation se dépose sur la peau, d'où il s'évapore lentement en prolongeant l'effet de froid.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser à 10-15 cms de la partie du corps à traiter, en déplaçant rapidement l'aérosol sur la zone traitée, la température atteinte est de l'ordre de moins 20°C

Arrêter immédiatement la pulvérisation à l'apparition de givre. Recommencer l'opération à la demande.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

ATTENTION: Une pulvérisation sur un point fixe peut provoquer une brûlure par le froid.

Ne pas utiliser sur un bébé ou jeune enfant de moins de 36 mois, préférer un sachet réutilisable conservé au réfrigérateur, ou un sac de froid instantané, dont la température est de l'ordre de 5°C

AVERTISSEMENT :

CE SPRAY FROID EST UN PRODUIT DE PREMIERE URGENCE.

LES FOULURES, ENTORSES, COUPS IMPORTANTS DEMANDENT DES TRAITEMENTS SUPPLEMENTAIRES PAR DES SPECIALISTES, MEDECINS, KINESITHERAPEUTES.....



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30
04 93 19 20 23

SPRAY FROID

Référence : 7002

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502