

MINIDAP SOLUTION DIPHOTÉRINE

Référence : 24026



Pour laver une projection sur la main, le visage...

FICHE TECHNIQUE

Solution de lavage d'urgence pour projections de produits corrosifs ou irritants sur l'oeil ou sur la peau.

Qu'est ce que la MICRO DAP?

La MICRO DAP est un spray contenant 100ml de Diphotérine destiné à un lavage de projection chimique dans les 60 premières secondes sur une main ou une petite surface corporelle.

Principes d'installation et d'utilisation des MICRO DAP:

Grâce aux 100ml de Diphotérine, La MICRO DAP permet un lavage efficace dans les 60 premières secondes après l'accident.

La MICRO DAP doit être disponible à proximité des zones à risques, ou être portée directement par l'opérateur à la ceinture ; son utilisation est particulièrement recommandée en laboratoire ou dans des zones à risques de projections sur des petites surfaces cutanées.

Protocole préconisé pour une efficacité maximale :

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



MINIDAP SOLUTION DIPHOTÉRINE

Référence : 24026

La MICRO DAP est destinée à un premier lavage d'urgence. Son contenu est préconisé pour des projections cutanées, comme une main ou une surface équivalente. En cas de projection cutanée plus étendue, nous recommandons l'utilisation de la DAP, Douche Autonome Portable de 5 litres.

L'efficacité de la MICRO DAP est permise par les propriétés actives de la Diphotérine.

Il est recommandé, lors d'un accident, d'utiliser tout le contenu de la MICRO DAP.

- Recommandations générales

La MICRO DAP doit être utilisée comme première solution et en première intention. Un lavage préalable à l'eau entraîne le retard d'application et réduit, par la perte de temps, l'efficacité de la Diphotérine.

Si vous ne disposez pas de Diphotérine sur le lieu de la projection, ne retardez jamais un lavage. A défaut, utilisez l'eau.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.

La MICRO DAP doit être utilisée en lavage continu ; la pulvérisation partielle ou non prolongée peut induire une diminution de la douleur mais ne pas empêcher la brûlure de se développer.

Champ d'efficacité et limites connues de la Diphotérine

La Diphotérine ® permet de stopper la pénétration du produit chimique et l'évolution de toutes les brûlures chimiques, à l'exception des projections d'acide fluorhydrique et de ses dérivés sur lesquels elle a une action réduite. Il

est dans ce cas spécialement recommandé d'utiliser l'Hexafluorine solution de lavage des projections d'acide fluorhydrique et fluorures en milieu acide.

- Que faire si la brûlure est déjà apparue ou si j'interviens au-delà des 60 secondes?

Au delà des 60 secondes, et en fonction du type de produit chimique, la brûlure peut déjà se développer. Un lavage, y compris sur une brûlure avérée, améliorera la mise en place des soins secondaires. La Diphotérine se révèle intéressante également dans les cas de lavage retardé (au delà des 60 secondes).

Dans ce cas, nous recommandons de poursuivre le lavage initial réalisé avec une MICRO DAP de Diphotérine ® , par un deuxième lavage d'une durée idéale de 3 à 5 fois le temps de contact.

- Entretien et Maintenance

La MICRO doit être stockée/rangée dans un endroit non exposé aux fortes températures et au soleil.

Il est également conseillé de ne pas exposer le produit au gel, car la solution aqueuse peut geler et n'être donc pas utilisable immédiatement.

Il n'y a cependant pas de perte d'efficacité lorsque la Diphotérine a dégelé. La température d'utilisation idéale est comprise entre 15 et 35°C.

La MICRO doit être remplacée à échéance de la date de péremption figurant sur l'étiquette.

- Toxicologie

La Diphotérine est une solution non irritante, non allergisante et non toxique.