

## ANIOSPRAY SURF 29 SPRAY AVEC PULVÉRISATEUR Référence : 23005

Sans rinçage, prêt à l'emploi.



### INDICATIONS

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

### COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), excipients.

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 : 5mn  
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 : 5mn  
Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 30mn  
Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus : 1mn

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS Premium.  
Pulvériser sur les surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie. (Volume à pulvériser : 80 ml/m<sup>2</sup>).  
Laisser la pièce fermée (portes et fenêtres) pendant 5 minutes minimum.  
Aérer si possible avant réutilisation.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS  
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30  
**04 93 19 20 23**

## ANIOSPRAY SURF 29 SPRAY AVEC PULVÉRISATEUR Référence : 23005

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit biocide - Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var**

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502