

ANIOSURF ND PREMIUM CITRON FLACON DOSEUR 1 LITRE

Référence : 23004



Solution concentrée. A diluer

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium
(N°CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), Digluconate de chlorhexidine
(N°CAS 18472-51-0 : 5.2 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries : EN 1040, EN 13727. Actif sur BMR et BHR : 15mn
Actif sur K. pneumoniae OXA 48 : 30mn
EN 13697 : 45mn

Mycobactéries : M. terrae : EN 14348 : 240 minutes / 2%
M. terrae : EN 13697 : 240 minutes / 0.5%

Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 15 min

Moisissures : EN 13624, EN 13697 : 90 minutes / 0.5%

Virus : Selon EN 14476 : PRV virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV),
Vacciniavirus, Herpesvirus : 5 minutes
Selon EN 14476 : Rotavirus : 60 minutes / 1%

MODE D'EMPLOI

Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. Dilution à 0,25% : Verser une dose de 20 ml d'ANIOSURF PREMIUM ND dans le seau de lavage.

Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.
Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30
04 93 19 20 23

ANIOSURF ND PREMIUM CITRON FLACON DOSEUR 1 LITRE Référence : 23004

Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2) et dispositif médical de classe IIa

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502