

## DRAP STÉRILE 1 FACE MÉTALLINE 73 X 250 CM

Référence : 24018

### Description :



- Indiqué pour la couverture des plaies étendues et des brûlures lors des premiers soins.
- Face aluminée côté plaie : ne colle pas, limite le traumatisme au retrait.
- Permet la respiration cutanée tout en laissant migrer les sécrétions.
- Contribue à garder la zone lésionnelle au sec, limitant macération et risque d'infection.
- Format généreux pour envelopper et sécuriser rapidement la zone atteinte.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 73 × 250 cm.
- **Composition** : nappe non-tissée à base de viscose + voile d'aluminium (face brillante côté plaie).
- **Propriétés** : non adhérente, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, drainage rapide des exsudats.
- **Condition** : stérilisé par irradiation, usage unique.
- **Fixation** : à maintenir avec sparadrap ou bande de contention.

## Drap stérile 1 face métalline : grande couverture non adhérente pour premiers soins

**Drap stérile 1 face métalline 73 × 250 cm** : large compresse aluminée non adhérente, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, conçue pour couvrir et protéger les plaies étendues et brûlures tout en favorisant le drainage vers la couche absorbante.

- **Face aluminée non adhérente**
- **Perméable air/vapeur d'eau**
- **Drainage rapide des exsudats**
- **Grand format 73 × 250 cm**
- **Usage unique, prêt à poser**

### Mode d'emploi :

- Appliquer le drap **côté brillant (aluminé)** sur la plaie propre selon protocole.
- Mettre en place une légère compression et fixer avec sparadrap ou bande.
- Vérifier régulièrement l'état de la plaie et remplacer si saturé.
- Éliminer après usage conformément à vos consignes internes.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## DRAP STÉRILE 1 FACE MÉTALLINE 73 X 250 CM

Référence : 24018

### Précautions d'utilisation :

- Usage unique ; ne pas réutiliser.
- Éviter l'association avec **pommades grasses ou poudres** qui entravent le drainage des exsudats.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur ; vérifier l'intégrité du conditionnement.
- En cas de doute ou de lésion profonde/étendue, faire évaluer par un professionnel.

### Protection des plaies étendues et brûlures : confort de pose et retrait atraumatique

Grâce à sa **face métalline non adhérente** et à sa **perméabilité**, le drap favorise un environnement de soin plus confortable : les exsudats migrent vers la couche absorbante, la zone reste plus sèche, la macération est limitée. Sa longueur **73 x 250 cm** facilite la couverture rapide des surfaces importantes.

Idéal en **premiers secours**, infirmeries et milieux professionnels, ce drap stérile s'intègre naturellement à vos protocoles de prise en charge et de renouvellement.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502