

## THERMOMÈTRE AURICULAIRE - BRAUN THERMOSCAN 3

Référence : 140115

[Thermomètre auriculaire]



### THERMOMETRE AURICULAIRE - Braun Thermoscan 3

#### **Caractéristiques :**

- Le thermomètre auriculaire, mesure de manière fiable et très rapide (1 seconde) la température auriculaire des bébés et de toute la famille.
- Un bip sonore vous prévient que la mesure de la température est terminée.
- Pour une hygiène parfaite, ses embouts de protection sont jetables et se remplacent facilement.
- Convient pour les nouveaux nés.

#### **Praticité :**

Il garde en mémoire la dernière température prise.

Le thermomètre auriculaire, émet des bips sonores pour indiquer l'intensité de la mesure effectuée :

Température normale : 1 bip.

Température élevée : 2 bips.

Haute température : 4 bips.

#### **Sécurité :**

Un verrouillage de sécurité sur la porte de la batterie est présent pour éviter tout risque d'étranglement.

#### **Accessoires :**

Inclus des embouts jetables (21).

### THERMOMETRE AURICULAIRE - Braun Thermoscan 3

- Rapide et précis (1 seconde)
- Indicateur de fièvre sonore
- Embouts jetables (21 fournis)
- Écran LCD + pile incluse
- Mémoire de la dernière mesure

#### **Informations complémentaires :**

#### **Utilisation :**

1. Pour obtenir des mesures précises, s'assurer qu'un filtre de lentille neuf et propre est en place avant chaque prise de température.



## THERMOMÈTRE AURICULAIRE - BRAUN THERMOSCAN 3

Référence : 140115

2. Pour mettre le thermomètre en marche, appuyer sur le bouton « start ». Durant une auto-vérification interne, l'afficheur indique tous les segments. Puis, la dernière température prise s'affiche, ainsi que le message « MEM ». Dès que ce symbole d'état prêt apparaît, la mesure peut commencer.

3. Tirer l'oreille pour redresser le conduit auditif afin que le thermomètre puisse bien détecter la membrane du tympan au moment de l'insertion. Pour bien tirer l'oreille, utiliser la main libre pour saisir le bord extérieur de la moitié supérieure de l'oreille.

Pour prendre sa propre température : placer la main libre derrière la tête et saisir l'oreille.

Enfants de moins d'un an : Tirer l'oreille vers l'arrière.

Enfants d'un an et plus et adultes : Tirer l'oreille vers le haut et l'arrière.

4. Bien introduire la sonde dans le conduit auditif, puis appuyer sur le bouton de mise en marche « start ». Un bref bip indique le début de la mesure. Après une seconde, un bip plus long indique la fin de la mesure. Le résultat apparaît sur l'afficheur.

5. Pour la mesure suivante, retirer le filtre de lentille usé, et fixer un filtre de lentille neuf et propre. Effacer le message sur l'afficheur en appuyant une fois sur le bouton de mise en marche « start ». Bien introduire la sonde dans le conduit auditif, puis appuyer sur le bouton de mise en marche « start ».

Le thermomètre auriculaire, s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité.