

TEST DE TEMPÉRATURE FRONTAL RÉUTILISABLE

Référence : 14015

Description :

- Test de fièvre gradué à *cristaux liquides* avec échelle sérigraphiée.
- Lecture visuelle intuitive, idéale pour un enfant endormi.
- Indicateur incassable, sans danger et *réutilisable*.
- Alerte sur un *état fébrile* et suivi des variations de température.
- Usage individuel recommandé ; contrôle de repérage (compléter par un thermomètre médical si fièvre indiquée).



Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 14015
- **Plage** : 35 à 40 °C
- **Précision** : $\pm 0,3$ °C ; **résolution** 0,5 °C
- **Temps de pose** : ~15 s au centre du front
- **T° de fonctionnement** : 20-30 °C
- **T° de stockage** : 5-65 °C (HR 15-95 %)
- **Poids** : 10 g
- **Garantie** : 1 an (conditions normales)
- **Principe** : changement de couleur des cristaux liquides selon T°

Test de température frontal réutilisable : contrôle visuel rapide, sans pile

Test de température frontal réutilisable : indicateur à cristaux liquides, lecture instantanée au front en 15 s, réutilisable et incassable, pour un repérage simple de l'état fébrile en mobilité et au poste d'accueil.

- **Lecture en ~15 s**
- **Plage 35-40 °C**
- **Précision $\pm 0,3$ °C**
- **Sans pile, réutilisable**
- **Incassable & compact**

Mode d'emploi :

- Peau propre et sèche ; patienter 10-15 min après effort/boissons chaudes/froides ou exposition thermique.
- Placer l'indicateur au centre du front en tenant les 2 extrémités, sans bouger ~15 s.
- **Codes couleurs** : Vert = T° correcte ; Rouge = déduire 0,5 °C ; Bleu = ajouter 0,5 °C.
- Noter l'indication ; nettoyer délicatement après usage et ranger au sec.
- Pour confirmation d'une fièvre, utiliser un *thermomètre médical* dédié.

Précautions d'utilisation :

- Contrôle indicatif ; ne remplace pas un dispositif de mesure médicale.



TEST DE TEMPÉRATURE FRONTAL RÉUTILISABLE

Référence : 14015

- Éviter usage sur peau lésée/irritée ; ne pas plier/égratigner l'indicateur.
- Conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.
- Usage individuel recommandé pour une hygiène optimale.
- Tenir hors de portée des enfants.

Contrôle ponctuel, économique et réutilisable

Compact et sans pile, le **test de température frontal réutilisable** permet un repérage **visuel** en quelques secondes grâce aux **cristaux liquides**. Sa plage **35-40 °C**, sa **précision $\pm 0,3$ °C** et son **temps de pose de 15 s** en font un outil simple pour l'**accueil**, les **déplacements** et la **trousse de secours**.

Réutilisable, **incassable** et **économique**, il aide à suivre les variations observées avant de confirmer si besoin avec un thermomètre médical. Un indispensable pratique pour vos dotations.