

LAVE-OEIL INDIVIDUEL DE DIPHOTÉRINE STÉRILISÉ 50 ML

Référence : 24023



Description :

- Conçu pour neutraliser les substances chimiques sur les yeux en cas de contact accidentel
- Efficacité maximale dans les 10 premières secondes suivant la projection
- Facile à transporter grâce à son format compact et son attache ceinture
- Utilisation recommandée comme premier lavage d'urgence
- Compatibilité avec les dispositifs muraux et portatifs pour un lavage prolongé

Caractéristiques techniques :

- **Contenance** : 50 ml de solution de diphotérine
- Livré avec **porte-ceinture en nylon** pour une portabilité optimale
- **Stérilisation** pour une application directe sur l'œil
- Compatible avec les stations de lavage 500 ml pour les soins prolongés
- Utilisation optimale en complément d'autres solutions selon les projections chimiques

Lave-oeil individuel stérilisé à la diphotérine 50 ml : une protection immédiate en cas de projection chimique

Solution de lavage portable et stérilisée, efficace pour neutraliser les projections chimiques en seulement 10 secondes.

- **Formulation spécifique pour les brûlures chimiques**
- **Intervention rapide en cas d'accident**
- **Application simple et immédiate**
- **Portable, avec attache ceinture pratique**
- **Solution stérile et prête à l'emploi**

Mode d'emploi :

- En cas de projection chimique, appliquez le lave-oeil dans les 10 premières secondes
- Utilisez l'intégralité du flacon pour une efficacité maximale
- En cas de brûlure persistante, poursuivez le lavage avec un flacon de 500 ml pour un nettoyage prolongé
- Facile à porter grâce au porte-ceinture, pour une intervention rapide



LAVE-OEIL INDIVIDUEL DE DIPHOTÉRINE STÉRILISÉ 50 ML Référence : 24023

Précautions d'utilisation :

- Utiliser le lave-oeil comme premier lavage d'urgence, sans prélavage à l'eau
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Éviter l'emploi pour des bains oculaires ; à privilégier en lavage direct
- Ne pas utiliser pour les projections d'acide fluorhydrique ; privilégier l'Hexafluorine

Protégez efficacement vos yeux en cas de projection chimique

Le lave-oeil individuel à la diphotérine stérilisé est spécialement formulé pour stopper rapidement la pénétration des produits chimiques. Il neutralise immédiatement les effets des acides, bases, et solvants, réduisant le risque de brûlure chimique et permettant une prise en charge rapide dans les 10 secondes suivant l'accident.

Adapté pour les premiers secours, cet équipement garantit une efficacité immédiate et peut être utilisé en complément des stations murales pour un lavage prolongé si nécessaire.

Retrouvez également l'ensemble de nos produits à base de **diphotérine**.