

GEL DOSE STÉRILE BURN CARE 3,5G

Référence : 24004

GEL DOSE STERILE - Burn Care 3,5g



Caractéristiques :

Le principe est de refroidir rapidement une brûlure par transfert de chaleur grâce au gel d'eau bactériostatique réparti à saturation sur des supports. L'application du produit directement sur la zone brûlée permet de stopper la progression de la chaleur, de stabiliser la température cutanée et centrale, de garder intact l'aspect de la brûlure, de ne pas adhérer à la peau et éviter, pour les brûlures graves, l'hypothermie.

Usage Unique gel dose de 3,5g

Propriétés :

- . Soulage la douleur
- . Refroidit
- . Prévient la déshydratation

Mode d'emploi :

Appliquer en couche épaisse sans frotter, ne pas faire pénétrer dans la peau. BURN CARE est plus efficace quand il est appliqué en couche épaisse, et laissé en contact avec la peau pour 30 minutes au minimum. Réappliquez aussi souvent que nécessaire.

Avertissement :

Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur les brûlures sérieuses. Si le problème persiste plus de 7 jours, si l'irritation, la rougeur, le gonflement ou la douleur persistent ou augmentent, si une éruption de boutons ou une infection se développe, arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.

Ingrédients :

Carbopol, chlorobutanol, éthanol, Irgasan, Melaleuca alternifolia, Polypropylène glycol, Eau purifiée, Trolamin

Gel dose stérile burn care 3,5 g : soulagement rapide des brûlures légères

Gel dose stérile Burn Care 3,5 g : la solution unidose, hygiénique et prête à l'emploi pour **refroidir** et **apaiser** immédiatement les **brûlures superficielles** à la maison, en atelier ou en déplacement.

- **Refroidissement et apaisement immédiats**
- **Unidose stérile 3,5 g, hygiénique**
- **Application propre, non grasse**
- **Format poche, trousse de secours**
- **Usage rapide, sans matériel spécifique**



GEL DOSE STÉRILE BURN CARE 3,5G Référence : 24004

Mode d'emploi :

- **Refroidir idéalement à l'eau tempérée** la zone atteinte (si disponible et compatible avec la situation).
- Ouvrir le **sachet unidose stérile** et appliquer le gel en couche généreuse, **sans frotter**.
- Laisser agir ; si besoin, **recouvrir d'une compresse stérile non adhérente** pour maintenir l'humidité.
- Surveiller l'évolution ; renouveler avec une nouvelle dose si nécessaire selon les consignes locales.
- Jeter le sachet après ouverture (usage unique).

Précautions d'utilisation :

- **Usage externe** uniquement ; ne pas appliquer sur **plaies profondes** ou zones étendues.
- Ne pas utiliser sur **brûlures chimiques/électriques, yeux, visage et muqueuses**.
- En cas de douleur intense, cloques importantes, surface large ou chez l'enfant : **consulter rapidement**.
- Vérifier l'intégrité du sachet ; **ne pas réutiliser** une dose entamée.
- Tenir hors de portée des enfants. Respecter les conseils de premiers secours en vigueur.

Soin des brûlures superficielles au quotidien et en déplacement

Pensé pour les interventions de **premiers secours**, le **gel dose stérile burn care 3,5 g** apporte une action **rafraîchissante** immédiate qui aide à limiter l'échauffement cutané et à améliorer le confort après un contact bref avec une source de chaleur (cuisine, bricolage, sport). Son format unidose stérile garantit une application hygiénique, pratique à garder dans une **trousse de secours** ou à proximité des postes exposés.

Facile à utiliser, il s'applique directement sur la zone concernée, puis peut être protégé par une compresse stérile non adhérente pour conserver l'humidité. C'est l'allié discret et efficace pour réagir vite face aux **brûlures superficielles** et aux petites zones touchées.

Prêt à intervenir en toute simplicité ? Ajoutez le **gel dose stérile Burn Care 3,5 g** à votre panier dès maintenant et complétez votre trousse de premiers secours.