

COMPRESSE BURNCARE 20CM X 20CM Référence : 240070

COMPRESSE BURNCARE - 20cm x 20cm



Caractéristiques :

- Compresse pour brûlures 20cm X 20cm
- Application : Brûlures légères et profondes. Protège contre les infections.
- Calme la douleur et les blessures de la peau.
- Hydrate, apaise et soulage.
- Ne colle pas à la peau brûlée. Non toxique.

Pour toute brûlure grave, merci de consulter un médecin

ATTENTION

Ne pas utiliser sur des brûlures de 3ème degré
Premiers soins d'urgence pour les brûlures, échaudures, coups de soleil uniquement. Ne pas utiliser pour la guérison.
Usage unique uniquement. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
Arrêter immédiatement l'utilisation en cas d'irritation.

COMPRESSE BURNCARE - 20cm x 20cm

La compresses hydrogel est spécifique pour les brûlures du 1er et du 2eme degré.

Le gel évacue la chaleur de la brûlure tout en soulevant la douleur, en refroidissant la peau et en protégeant contre la contamination par l'air.

La compresse est à base d'eau, et soluble dans l'eau.

Ingrédients : Gel 90% eau purifiée contenant 1,5% huile de Melaleuca, émulsifiants et tensioactif

Attention : Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Pour toute brûlure grave, merci de consulter un médecin

COMPRESSE BURNCARE - 20cm x 20cm

Mode d'emploi:

Pour les brûlures dues à la chaleur:



COMPRESSE BURNCARE 20CM X 20CM Référence : 240070

Placer la compresse sur la plaie, puis presser le reste du gel du sachet de manière uniforme.

Laissez la compresse sur la peau pendant au moins 30 minutes. Veillez à ne pas exercer une pression trop forte.

Cette compresse est soluble et peut se rincer avec du sérum physiologique ou de l'eau stérile si nécessaire.

Pour les brûlures chimiques:

Si le produit chimique est liquide, il faut l'irriguer sur la zone affectée avec de l'eau tiède (entre 15 et 25°) pendant environ 15-20 minutes.

Si le produit chimique est en poudre, il faut le broser soigneusement sur la zone affectée, puis rincer la zone de la plaie à l'eau tiède pendant environ 15 à 20 minutes. Suivez les instructions comme pour une brûlure par la chaleur.