

TULLE GRAS VASELINÉ BOÎTE DE 10 COMPRESSES 10CM X 10CM

Référence : 24015



Les mailles de la gaze ainsi que le taux élevé d'imprégnation en vaseline favorisent le drainage des exsudats, évitant tout risque de macération et favorisant le rétablissement rapide de l'aspect de la peau.

Le pansement est composé exclusivement de substances neutres, non adhérent et hypoallergénique. Bonne tolérance cutanée.

Caractéristiques :

- Traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue
- Pansement gras protecteur et non adhérent à la plaie, retrait indolore
- Constitué de gaze hydrophile 100% coton imprégné de Vaseline

Indications :

- Brûlures superficielles (1er et 2ème degré)
- Plaies faiblement exsudatives en phase de bourgeonnement et d'épidermisation (dermabrasions, coupures, ulcères, escarres...)

Autre taille disponible :

- Boîte de 10 compresses
5cm x 5cm - Réf:24036

Tulle Gras Vaseliné (10cm x 10cm) - Boîte de 10 compresses

Composé à 100% de gaze hydrophile en coton, notre tulle gras vaseliné est imprégné de Vaseline, offrant ainsi une barrière protectrice supplémentaire. Cette formulation spéciale favorise un environnement propice à la cicatrisation tout en préservant la peau.



TULLE GRAS VASELINÉ BOÎTE DE 10 COMPRESSES 10CM X 10CM Référence : 24015

Choisissez la qualité pour un soulagement efficace et une récupération rapide des brûlures cutanées.

Indications du DM : Brûlures et échaudures légères, lacérations, plaies superficielles en voie d'épidermisation, ulcères et autres plaies présentant une perte de substance cutanée.

Précautions d'emploi : Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.

Mode d'emploi :

- Après avoir nettoyé la plaie, ouvrir le sachet et extraire le pansement vaseliné.
- Oter le film protecteur et appliquer le pansement sur la plaie.
- Enlever le second film protecteur.
- Recouvrir de compresses stériles et maintenir le pansement avec une bande de maintien.
- Renouveler le pansement 2 à 3 fois par semaine en fonction de l'exsudation de la plaie.

Durée : court terme

Utilisation : entre 60 minutes et 30 jours

Durée de validité du produit : 5 ans à partir de la date de fabrication.

Mode de stérilisation : Stérilisé par rayons gamma selon la norme NF EN ISO 11137-1 : 2016 et NF EN ISO 11137-2 : 2015

Conditions de stockage: Conserver à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité.