

SOLUTION OCULAIRE AFTERWASH II 200 ML AVEC ŒILLÈRE

Référence : 24025



Description

Le **flacon de rinçage oculaire Afterwash II 200ml** est une solution de confort isotonique aux larmes. Il est prévu pour être utilisé après un lavage à la Diphotérine afin de faciliter un retour plus rapide de l'œil à un état physiologique.

Ce flacon peut également être utilisé en cas de présence d'un corps étranger non chimique dans l'œil. Son format de 200ml est accompagné d'une œillère pour faciliter l'utilisation sur l'œil touché.

En cas de projection, l'utilisation du produit doit intervenir rapidement. Pour une efficacité optimale, l'application est recommandée dans les 60 secondes suivant la projection et l'intégralité du contenu doit être utilisée sur l'œil concerné.

Le produit doit rester disponible dans de bonnes conditions de stockage afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de besoin. Il est conseillé d'éviter toute exposition au gel et de conserver le flacon à une température comprise idéalement entre 15 et 35°C.

Caractéristiques techniques

- Référence 24025
- Contenance 200ml
- Format Flacon de rinçage oculaire avec œillère
- Usage principal Rinçage oculaire après lavage à la Diphotérine
- Livré avec 1 œillère
- Stockage recommandé Éviter le gel, température idéale entre 15 et 35°C

Propriétés de la solution Afterwash II

La solution Afterwash II est une **solution de confort isotonique aux larmes**. Elle peut être utilisée après un lavage à la Diphotérine pour faciliter un retour plus rapide à un état physiologique ou en présence d'un corps étranger non chimique dans l'œil. Le flacon de 200ml est fourni avec une œillère et son contenu doit être entièrement utilisé sur l'œil touché en cas de projection.



SOLUTION OCULAIRE AFTERWASH II 200 ML AVEC ŒILLÈRE

Référence : 24025

Flacon de rinçage oculaire Afterwash II 200ml : solution de confort après lavage à la Diphotérine

Flacon de rinçage oculaire Afterwash II 200ml avec œillère, conçu pour être utilisé après un lavage à la Diphotérine afin de faciliter un retour plus rapide à un état physiologique.

- Flacon de 200ml
- Œillère incluse
- Solution isotonique aux larmes
- Après lavage à la Diphotérine
- Usage oculaire immédiat

Mode d'emploi

- Utiliser le flacon après un lavage préalable à la Diphotérine.
- Appliquer la solution sur l'œil touché à l'aide de l'œillère incluse.
- Utiliser le produit dans les 60 secondes suivant la projection pour une efficacité optimale.
- Employer l'intégralité du contenu du flacon sur l'œil concerné en cas de projection.
- Utiliser également la solution en cas de présence d'un corps étranger non chimique si nécessaire.

Précautions d'utilisation

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.
- Utiliser tout le contenu du flacon en cas de projection.
- Éviter d'exposer le produit au gel, car la solution aqueuse pourrait ne plus être utilisable immédiatement.
- Conserver idéalement le flacon à une température comprise entre 15 et 35°C.
- En l'absence de flacon sur le lieu de la projection, ne jamais retarder un lavage : utiliser de l'eau.

Une solution oculaire complémentaire après lavage à la Diphotérine

Le **flacon de rinçage oculaire Afterwash II 200ml** répond aux besoins des entreprises, ateliers, laboratoires et environnements exposés aux projections chimiques. Utilisée après un lavage à la Diphotérine, cette solution isotonique aux larmes contribue à faciliter un retour plus rapide de l'œil à un état physiologique.

Son format avec œillère permet une utilisation directe sur l'œil touché et son contenu de 200ml est prévu pour être entièrement employé en cas de projection. Pour compléter votre équipement face aux risques chimiques, retrouvez nos [solutions dédiées aux brûlures chimiques et au rinçage d'urgence](#).

À quoi sert le flacon de rinçage oculaire Afterwash II ?

+



SOLUTION OCULAIRE AFTERWASH II 200 ML AVEC CÆILLÈRE

Référence : 24025

La solution Afterwash II s'utilise après un lavage à la Diphotérine afin de faciliter un retour plus rapide de l'œil à un état physiologique. Il s'agit d'une solution de confort isotonique aux larmes.

Peut-on utiliser Afterwash II en présence d'un corps étranger dans l'œil ?

+
Oui, cette solution peut être utilisée en cas de présence d'un corps étranger non chimique. Elle convient ainsi à certains besoins de rinçage oculaire au-delà de son utilisation après Diphotérine.

Quand utiliser le flacon Afterwash II après une projection ?

+
Pour une efficacité optimale, l'utilisation doit intervenir dans les 60 secondes suivant la projection. Le contenu du flacon doit être entièrement utilisé sur l'œil touché.

Que faire si aucun flacon de rinçage oculaire n'est disponible immédiatement ?

+
Il ne faut jamais retarder un lavage. En l'absence de flacon disponible sur le lieu de la projection, il convient d'utiliser de l'eau immédiatement.

Comment conserver le flacon de rinçage oculaire Afterwash II ?

+
Il est conseillé de ne pas exposer le produit au gel, car la solution aqueuse pourrait ne pas être utilisable immédiatement. La température idéale de conservation est comprise entre 15 et 35°C.