

FLACON RINÇAGE OCULAIRE 200ML

Référence : 24025

A utiliser après un lavage à la diphotérine



Flacon de 200ml + 1 œillère

La solution Afterwash II est une solution de confort isotonique aux larmes. Elle peut être utilisée après un lavage à la Diphotérine pour faciliter un retour plus rapide à un état physiologique ou peut être utilisée en cas de présence d'un corps étranger non chimique.

Pour une efficacité optimale, l'utilisation du produit dans les 60 secondes après la projection.

Le contenu du flacon doit-être entièrement utilisé sur l'œil touché.

Recommandations :

Un lavage préalable à l'eau entraîne le retard d'application.

Cependant, si vous ne disposez pas de flacon sur le lieu de la projection, ne retardez jamais un lavage, utiliser l'eau.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.

Utiliser tout le contenu en cas de projection.

Entretien et maintenance :

Il est conseillé de ne pas exposer les produits au gel, car la solution aqueuse peut geler et donc ne pas être utilisable immédiatement.

La température idéale est comprise entre 15° et 35°C.