

BOÎTE DE 10 COMPRESSES MÉTALLINES - 8CM X 10CM Référence : 24017

COMPRESSES METALLINES - Boîte de 10 compresses 8cm x 10cm



Caractéristiques:

- La compresse Metalline est indiquée pour les plaies, les brûlures et les premiers soins.
- La compresse est composée, côté plaie, d'un non-tissé aluminé extrêmement fin qui les rend souples et doux tout en assurant un bon drainage. La surface aluminée empêche d'adhérer à la plaie.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- La plaie et son pourtour sont gardés au sec ; la macération est évitée ainsi les risques d'infection
- Stérilisé par irradiation.

Composition :

- Nappe en non-tissé à base de viscose.Voile d'aluminium.

Autre taille disponible :

Compresse en bande de **10cm x 5cm - Réf:24016**

COMPRESSES METALLINES - Boîte de 10 compresses 8cm x 10cm

- La compresse Metalline est indiquée pour les plaies, les brûlures et les premiers soins.
- La compresse est composée, côté plaie, d'un non-tissé aluminé extrêmement fin qui les rend souples et doux tout en assurant un bon drainage. La surface aluminée empêche d'adhérer à la plaie.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- La plaie et son pourtour sont gardés au sec ; la macération est évitée ainsi les risques d'infection
- Stérilisé par irradiation.

Autre taille disponible :

- Compresse en bande de **10cm x 5cm - Réf:24016**

Informations complémentaires :

Indications:

- Incisions chirurgicales, y compris les greffes de peau et les sites donneurs.
- Coupures accidentelles, abrasion, brûlures.
- Maladies de la peau et escarres de décubitus.

Mode et précaution d'emploi:



BOÎTE DE 10 COMPRESSES MÉTALLINES - 8CM X 10CM Référence : 24017

- Découper la bande selon le format désiré.
- Appliquer la compresse côté brillant sur la plaie.
- La fixer, en exerçant une légère compression, à l'aide d'un sparadrap ou d'une bande.
- Éviter le contact avec des pommades grasses et des poudres qui empêcheraient la migration des exsudats dans la partie absorbante de la compresse.