

100 AIGUILLES INTRA DERMIQUE ORANGE ADULTE 16MM 5/10

Référence : 16002-100



Description :

- Conçues pour des **procédures d'injection** (ex. intramusculaire, intraveineux) selon vos pratiques.
- Format **16 mm** avec calibre **25G** pour un geste plus contrôlé.
- **Stériles** et à **usage unique** pour limiter les manipulations après utilisation.
- Coloris **orange** pour une identification rapide au poste de soin.
- Conditionnement en **sachet de 100** pour sécuriser le stock et standardiser l'équipement.

Caractéristiques techniques :

- **Calibre** : 25G
- **Longueur** : 16 mm
- **Diamètre** : 5/10
- **Stérilité** : Aiguilles hypodermiques stériles
- **Conditionnement** : Sachet de 100 (réf. 16002-100)

Aiguilles intra dermique orange adulte 16mm 5/10 : Pour des injections maîtrisées et régulières

Des **aiguilles hypodermiques stériles** à **usage unique**, pensées pour faciliter la préparation et assurer une **pénétration nette** lors des procédures d'injection.

- **Stériles et à usage unique**
- **Couleur orange repérable**
- **Calibre 25G**
- **Longueur 16 mm**
- **Sachet économique de 100**

Mode d'emploi :

- Sortir une **aiguille stérile** au moment de l'utilisation et vérifier l'intégrité du conditionnement.
- Installer l'aiguille sur le dispositif compatible, selon votre protocole.
- Réaliser la procédure d'injection prévue avec une manipulation stable et maîtrisée.
- Après usage, ne pas réutiliser : produit à **usage unique**.
- Éliminer immédiatement dans un collecteur adapté aux objets piquants/coupants, selon vos procédures.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert, endommagé ou si la stérilité est suspectée.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 AIGUILLES INTRA DERMIQUE ORANGE ADULTE 16MM 5/10

Référence : 16002-100

- Manipuler avec précaution : risque de piqûre accidentelle.
- Ne pas recapuchonner ni laisser traîner l'aiguille après utilisation.
- Stocker au sec, à l'abri de la chaleur et de l'écrasement pour préserver le conditionnement.
- Produit destiné aux personnes formées, conformément aux pratiques en vigueur.

Une aiguille 25G orange pour standardiser vos consommables d'injection

Les **aiguilles intra dermique** au format **16 mm** et diamètre **5/10** répondent au besoin de disposer d'un consommable fiable, immédiatement identifiable et simple à gérer au quotidien. Le calibre **25G** (repère **orange**) aide à limiter les confusions et à gagner en fluidité lors de la préparation, tandis que le **sachet de 100** facilite l'anticipation des consommations et la continuité d'approvisionnement. Pour compléter votre sélection, retrouvez nos [Aiguilles](#) et notre gamme d'[Instrumentation Médicale](#).

En choisissant des **aiguilles hypodermiques stériles à usage unique**, vous simplifiez l'organisation du poste et la gestion après utilisation.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502