

COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 10CM X 10CM X 3CM

Référence : 3026

Description :



- Plus besoin d'exercer une pression continue, le coussin s'en charge pour vous
- Conçu pour **stopper les hémorragies sévères**
- Sans les effets secondaires indésirables d'un garrot
- **Facile à transporter** dans une poche ou un sac
- Adapté à différentes blessures (coupures, lacérations...)

Caractéristiques Techniques :

- **1 mousse** 10cm x 10cm x 3cm en Polyuréthane 24kg/m3
- **1 pansement** « Fluff Américain » 7.50 x 5cm intégré au coussin de mousse
- **1 bande élastique** de maintien 10cm x 2.5m étirés, solidaire du coussin
- Compresse de gaze, gants vinyle, mode d'emploi inclus
- Durée de vie de 4 ans

Coussin hémostatique d'urgence : Votre allié pour stopper les hémorragies

Le coussin hémostatique d'urgence est la solution indispensable pour **gérer les hémorragies** importantes en attendant l'arrivée des secours.

Compact et facile à utiliser, il permet d'appliquer une **pression constante sur la plaie**, ralentissant ainsi le flux sanguin et favorisant la **coagulation**.

- **Remplace la compression manuelle**
- **Efficace sur les plaies importantes**
- **Alternative au garrot**
- **Compact et léger**
- **Polyvalent**

Produits Complémentaires :

- [Coussin hémostatique d'urgence 5cm x 8 m x 3cm](#) - Réf: 3025
- [Bande compressive absorbante 8cm x 10cm](#) - Réf: 3030
- [Bande compressive absorbante 6cm x 8cm](#) - Réf: 3050
- [Bande compressive absorbante 10cm x 12cm](#) - Réf: 3031

Utilisation :

- **Localisez la plaie** : Identifiez la source du saignement.



COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 10CM X 10CM X 3CM

Référence : 3026

- **Appliquez le coussin** : Placez le côté avec le pansement directement sur la plaie.
- **Exercez une pression** : Appuyez fermement sur le coussin pour stopper le saignement
- **Maintenez en place** : Utilisez la bande élastique pour fixer solidement le coussin.
- **Surveillez la victime** : Attendez l'arrivée des secours médicaux.

Précautions d'emploi :

- **Ne pas utiliser sur les yeux** : Le coussin n'est pas conçu pour les blessures oculaires
- **Ne pas réutiliser** : Le coussin est à usage unique pour des raisons d'hygiène
- Après utilisation, consultez un professionnel de santé pour un suivi approprié.
- Bien que simple d'utilisation, une formation aux gestes de premiers secours est toujours bénéfique.

Face à une hémorragie, chaque seconde compte. Le coussin hémostatique d'urgence vous offre la possibilité d'agir rapidement et efficacement, même sans formation médicale préalable.

Retrouvez également l'ensemble de nos [coussins hémostatiques](#).